

## **Prontosan® Wound Spray**

Solución para limpiar, irrigar y humedecer heridas superficiales

### **COMPOSICIÓN**

- Agua purificada
- Surfactante betaina
- 0,1% Polihexanida

### **ASPECTO Y OLOR:**

Solución acuosa de color claro y prácticamente inodora.

### **CONSERVACIÓN Y PERIODO DE UTILIZACIÓN:**

- 12 meses una vez abierto.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Mantenga el envase lejos de la luz directa del sol.

### **INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:**

Prontosan® Wound Spray esta indicado en los siguientes casos:

- Para limpiar irrigar y humedecer heridas superficiales agudas y crónicas (lesiones cutáneas, mordiscos, laceraciones, abrasiones, lesiones por aplastamiento) y quemaduras superficiales.
- Para la limpieza de orificios de inserción de sondas, drenajes y catéteres.
- Para la retirada de apósitos secos, residuos adhesivos y vendajes.

Prontosan® Wound Spray ayuda a la rápida cicatrización de las heridas gracias a su capacidad de limpieza y humectación de heridas y quemaduras superficiales.

Aplicar abundantemente sobre toda la herida o zona a tratar y su alrededor. De esta manera se reduce el riesgo de infección y se generan unas condiciones óptimas para la curación. A continuación, cubra la herida con un apósito.

En el caso de vendajes coagulados o encostrados, si se humedecen con Prontosan® Wound Spray será más fácil retirarlos y se evita causar daño al hacerlo.

Antes de usar Prontosan® Wound Spray, limpie bien la zona para eliminar residuos de jabón, ungüentos y aceites u otras sustancias de limpieza de heridas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Previene la infección de la herida.
- Favorece la cicatrización de heridas.
- Previene la formación de biofilm.
- No inhibe la granulación ni la epitelización.
- Reduce el olor de la herida.
- Aplicación indolora.
- No irrita y se tolera bien.
- Reduce el dolor.
- Compatible con los materiales de sondas y catéteres.

**ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:**

- Sólo para uso externo en heridas. No utilizar para infusión o inyección. No ingerir.
- En casos excepcionales, al aplicar Prontosan® Wound Spray sobre la superficie de la herida puede producirse una ligera sensación de escozor, que desaparecerá en unos minutos.
- Los productos Prontosan® pueden causar reacciones alérgicas, picazón (urticaria) y sarpullido (exantema).
- Aunque es poco frecuente (menos de 1 de cada 10.000), según informes se han producido choques anafilácticos.
- No utilice Prontosan® Wound Spray si se sabe que el paciente es alérgico o si se sospecha que pueda ser alérgico a alguno de los ingredientes del producto.
- No utilice Prontosan® Wound Spray en el SNC (Sistema Nervioso Central) ni en las meninges; tampoco en el oído medio ni interno, en el cartílago hialino ni en los ojos.
- Evite la inhalación del aerosol de Prontosan® Wound Spray.
- No lo utilice en combinación con surfactantes aniónicos, porque éstos pueden interactuar con la polihexanida.
- No utilice frascos o envases que tengan desperfectos.
- Los frascos o envases que hayan estado en contacto con la herida deberán desecharse después del uso.
- No utilice el producto durante más de 30 días.

**PRESENTACIONES:**

Producto	Código	Volumen	Unidades
Prontosan® Wound Spray	400565	75 ml	20 por caja

---