

## DFV Test LEA (Leishmania + Ehrlichia + Anaplasma)

Inmunocromatografía para la detección de anticuerpos contra *Leishmania*, *Ehrlichia* y *Anaplasma* en perros a partir de suero, plasma o sangre entera.

### DESCRIPCIÓN:

Detección en un único ensayo de anticuerpos contra *Leishmania infantum* y anticuerpos específicos frente *Ehrlichia canis* y/o *Anaplasma platys*.

Pueden detectarse como positivo a *Ehrlichia* + *Anaplasma* algunas muestras infectadas por *Anaplasma phagocytophilum*.



### MUESTRAS:


- Se recomienda utilizar muestras de suero
- Sangre con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina)
- Plasma

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas.

### MODO DE EMPLEO:

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el dispositivo en una superficie plana y sin moverlo hasta finalizar el ensayo.

1. Usando la pipeta, tomar muestra hasta la línea marcada (20 µl) y depositarla en el pocillo (S).
2. Añadir todo el contenido del vial con la solución tampón en el pocillo de muestra (S).
3. Efectuar la lectura a los 10 minutos de que el avance por la membrana sea visible (use reloj).

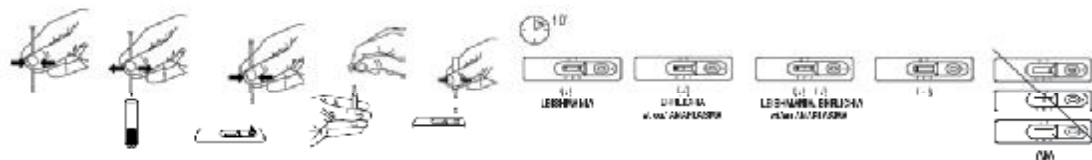

### LECTURA DE LOS RESULTADOS:

**Positivo (+) *Leishmania*:** Una banda de color en la zona test 1 y otra en la zona control (C).

**Positivo (+) *Ehrlichia* y/o *Anaplasma*:** Una banda de color en la zona test 2 y otra en la zona control (C).

**Negativo (-):** Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C).

**No válido (NV):** Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir el ensayo con un nuevo dispositivo.

### CONTENIDO DEL KIT:

- 1 tubo con anticoagulante
- 1 pipeta de plástico
- 1 vial con solución tampón
- 1 sobre que contiene 1 dispositivo

**CONSERVACIÓN:** Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30°C. No necesita refrigeración. No congelar. Proteger de la luz solar directa.

Conservado adecuadamente, el producto es estable como mínimo hasta la fecha de caducidad indicada en el mismo.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Cajas de 1 y 20 kits.

**Nº de registro:** 1818-RD