



LifeChip® Petite

985.141000923166

LifeChip® Petite

- 10 microchips ISO estériles en jeringas para implantación.
- Código de identificación único e inalterable de 15 dígitos.
- Jeringa estéril de un solo uso, ergonómica con «Sistema de no retorno» para evitar la pérdida del microchip.
- Pegatinas con código de barras personalizado.

LifeChip® Petite
(aguja calibre 15 G)



Caja con 10 jeringas esteriles Norma ISO.

LifeChip® Petite

Especies de destino



Perros, gatos, hurones y conejos

Descripción del producto y beneficios

LifeChip® Petite es un microchip con los más altos estándares de MSD Animal Health. Por sus dimensiones reducidas, este microchip se adapta a todas las especies de destino independientemente de su tamaño. Con tecnología antimigración gracias a su recubrimiento con Parylene C. Dispone de un aplicador ergonómico que facilita la implantación; una aguja pequeña, atraumática y lubricada (calibre 15G) con sistema de no retorno para evitar la pérdida prematura del microchip.

Precauciones especiales

Conservar LifeChip® Petite en su caja hasta que se vaya a utilizar. El envase interior es estéril hasta que se abra o se dañe. La aguja puede separarse de la jeringa para su eliminación.

Solo para uso veterinario. No utilizar en animales con un microchip ya implantado. No utilizar en animales de abasto. No reutilizar la jeringa.


Características	LifeChip® Petite
Dimensiones	1.4 mm * 10.3 mm
Temperatura de almacenamiento	-40°C hasta +90°C
Frecuencia	134.20 kHz
Encapsulado de vidrio	BioGlass 8625

GUIA PARA LA IMPLANTACIÓN ANTES DE LA IMPLANTACIÓN



1

Pasar el lector a la mascota para asegurarse de que no tenga implantado otro microchip.

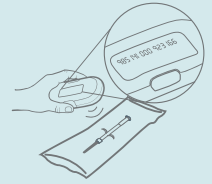


2

Antes de implantarlo, leer el microchip y confirmar que el número de 15 dígitos que aparece se corresponde con el código de barras.



3

Desinfectar el lugar de implantación (en el lado izquierdo del cuello).

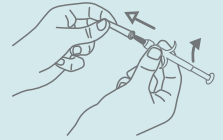

4

Sacar la jeringa del envase, quitar la tapa de la aguja y el anillo de seguridad.



5

Asegurarse de que el bisel de la aguja está orientado hacia el profesional que va a implantar el microchip.


¿DÓNDE Y CÓMO IMPLANTAR EL MICROCHIP?

Implantación subcutánea: en la parte izquierda del cuello.




6

Tomar un pliegue de la piel entre 1 o 2 dedos y el pulgar. Introducir la aguja justo debajo del pliegue.

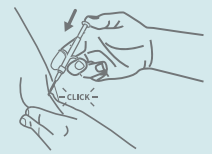

7


Una vez que la aguja esté completamente debajo de la piel, presionar el émbolo hasta que haga clic.

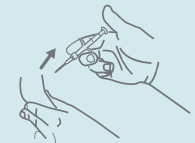

8


Continuar sujetando la piel alrededor de la aguja mientras se extrae esta última.

DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN

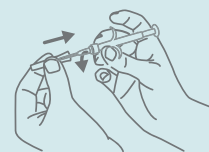

9

Desechar la aguja usando un contenedor apropiado para objetos punzantes, tratándola como un desecho sanitario.

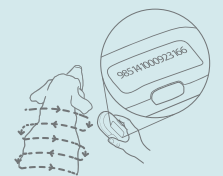

10

Pasar el lector a la mascota para confirmar que el microchip está bien colocado.