


DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS

GUIDED | KIT

DASURGICAL

SISTEMA UNIVERSAL

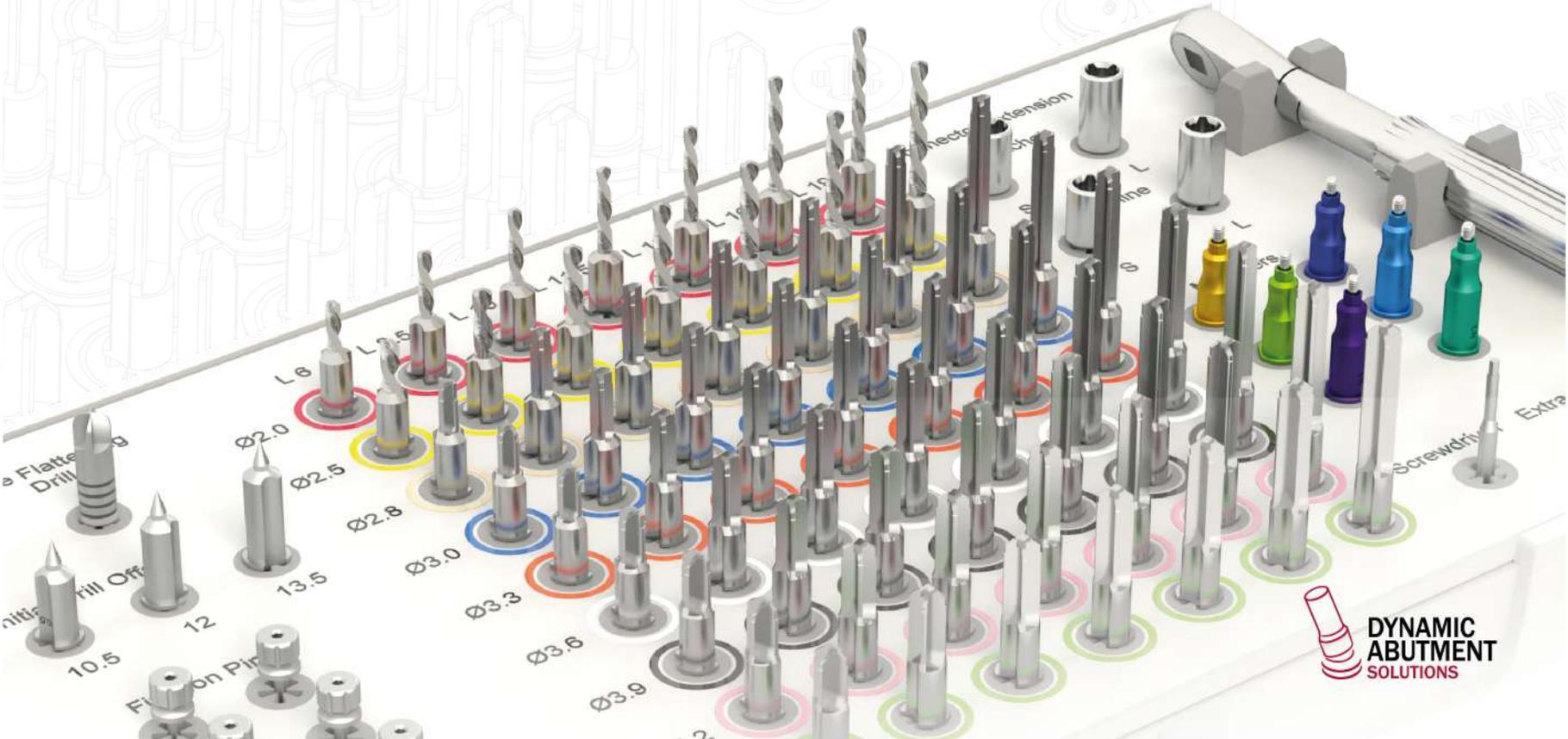



Virginia Woolf, 17
25005, Lleida (Spain)

INTERNATIONAL +34 873 450 709
das@dynamicabutment.com

USA +34 873 450 707
usa@dynamicabutment.com

SPAIN +34 973 289 580
spain@dynamicabutment.com

Dynamic Abutment Solutions es la marca comercial del fabricante Talladium España S.L. La información incluida en este catálogo está dirigida exclusivamente a profesionales del sector dental.

Todas las marcas comerciales aquí mencionadas están plenamente registradas por sus respectivas empresas y las imágenes que aparecen son sólo orientativas. Talladium se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso.

Talladium no se hace responsable del uso indebido de estos productos si las indicaciones de advertencia correspondientes a cada referencia no se han tenido en cuenta.

Pregunta por los productos disponibles con la normativa CE. Algunos de los productos no están autorizados para su venta y distribución o no tienen licencia de venta en algunos países en función de sus legislaciones. Información: das@dynamicabutment.com.





Este manual se dirige exclusivamente a profesionales clínicos. Tanto el manual como las imágenes y los logotipos que aparecen en él se encuentran protegidos por derechos de autor. Queda prohibido y será punible todo uso que infrinja los derechos de autor, salvo cuando dicho uso haya sido autorizado por escrito por Dynamic Abutment Solutions.

El Kit de Cirugía Guiada DAS se ha concebido para usarse en la colocación de cualquier sistema de implantes, con las fresas y las longitudes indicadas en el Kit. Se trata del kit de cirugía guiada más versátil del mercado.

El Kit incluye fresas de cirugía guiada, destornilladores específicos y dispositivos de montaje para la cirugía guiada. Todos los componentes están dispuestos en orden con el fin de facilitar el flujo de trabajo.

ÍNDICE

| | |
|----|---|
| 7 | VENTAJAS |
| 8 | FLUJO DE TRABAJO PARA LA GUÍA QUIRÚRGICA DAS |
| 10 | KIT DE CIRUGÍA GUIADA DAS |
| 19 | COMPONENTES DEL KIT DE CIRUGÍA GUIADA DAS |
| 20 | FRESAS Y PINES DE FIJACIÓN |
| 22 | FRESAS |
| 24 | ANILLAS |
| 26 | TRANSPORTADORES DE IMPLANTES |
| 30 | PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA 100 % GUIADA |
| 32 | EJEMPLO DE SECUENCIA DE FRESADO |
| 34 | MISMA CONEXIÓN, DIFERENTE MONTURA DE IMPLANTE |
| 36 | EXTENSORES |
| 37 | DESTORNILLADOR Y EXTRACTOR |
| 38 | LIBRERÍAS |





Kit Universal

Para todos los sistemas de implantes (\varnothing máx.: 4,7 mm)



Sistema de fresado 100 % guiado



Una única anilla DAS



Transportadores de implantes guiados para distintas conexiones y plataformas protésicas



Fresas de hasta 19 mm



Múltiples opciones entre implante y transportador



El diseño de las distintos offsets permite una colocación óptima del implante y la anilla



Todos los cálculos y las mediciones se realizan antes de la cirugía



Procedimiento mínimamente invasivo



Permite preservar los aumentos óseos y las elevaciones del seno



La cirugía requiere menos tiempo



Se planifican los pilares y los pilares de cicatrización




Máxima precisión



Flujo de trabajo totalmente guiado con Dynamic TiBase y Multi-Unit DAS System

FLUJO DE TRABAJO

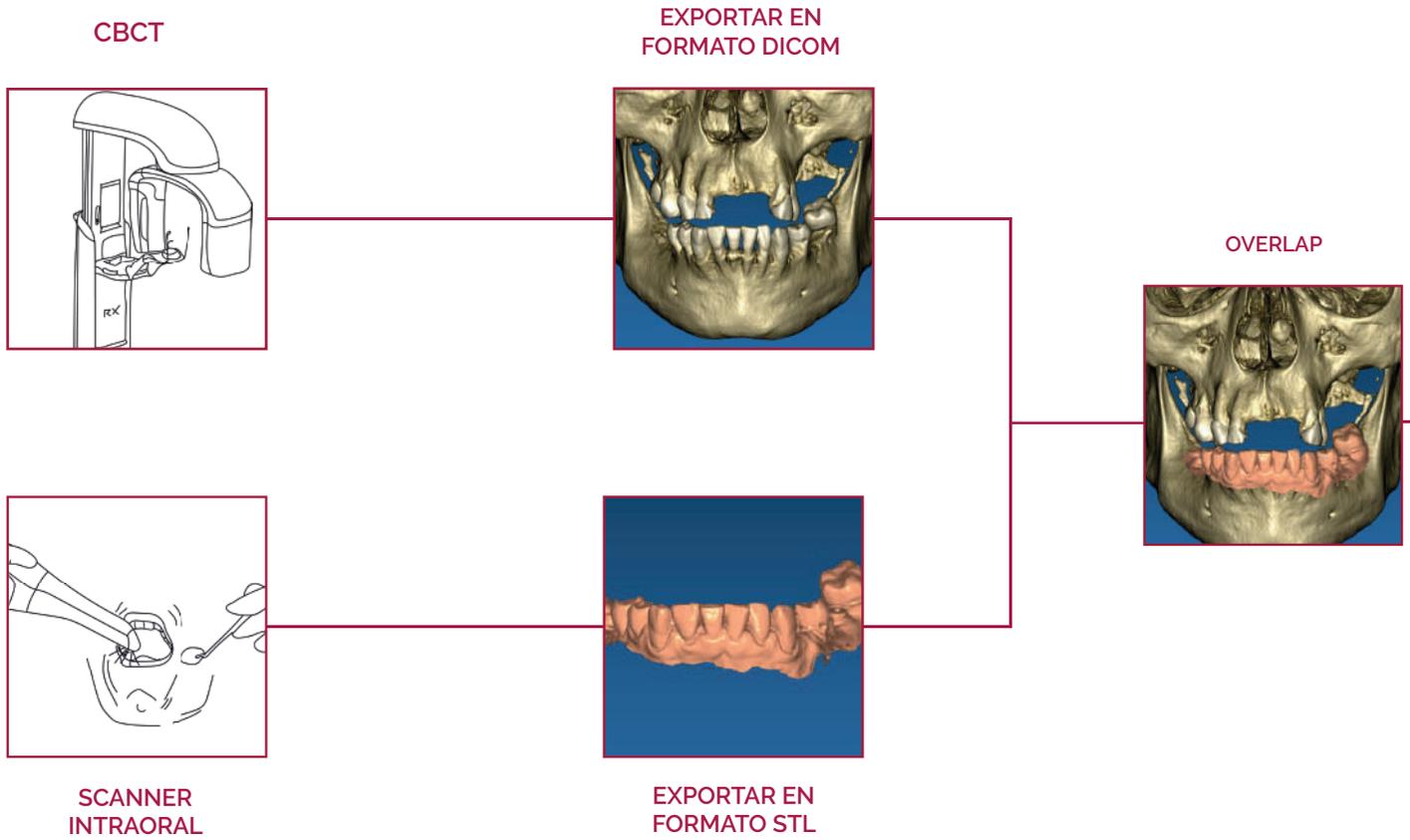

MODELO DE PRÓTESIS EN LABORATORIO CON COMPONENTES DAS



PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES




GUÍA QUIRÚRGICA




MODELO 3D IMPRESO

KIT DE CIRUGÍA GUIADA

| Ø 2,0 | Ø 2,5 | Ø 2,8 | Ø 3,0 | Ø 3,3 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060.220.01-2 | 74.060.225.01-2 | 74.060.228.01-2 | 74.060.230.01-2 | 74.060.233.01-2 |
| 74.085.220.01-2 | 74.085.225.01-2 | 74.085.228.01-2 | 74.085.230.01-2 | 74.085.233.01-2 |
| 74.100.220.01-2 | 74.100.225.01-2 | 74.100.228.01-2 | 74.100.230.01-2 | 74.100.233.01-2 |
| 74.115.220.01-2 | 74.115.225.01-2 | 74.115.228.01-2 | 74.115.230.01-2 | 74.115.233.01-2 |
| 74.130.220.01-2 | 74.130.225.01-2 | 74.130.228.01-2 | 74.130.230.01-2 | 74.130.233.01-2 |
| 74.160.220.01-2 | 74.160.225.01-2 | 74.160.228.01-2 | 74.160.230.01-2 | 74.160.233.01-2 |
| 74.190.220.01-2 | 74.190.225.01-2 | 74.190.228.01-2 | 74.190.230.01-2 | 74.190.233.01-2 |

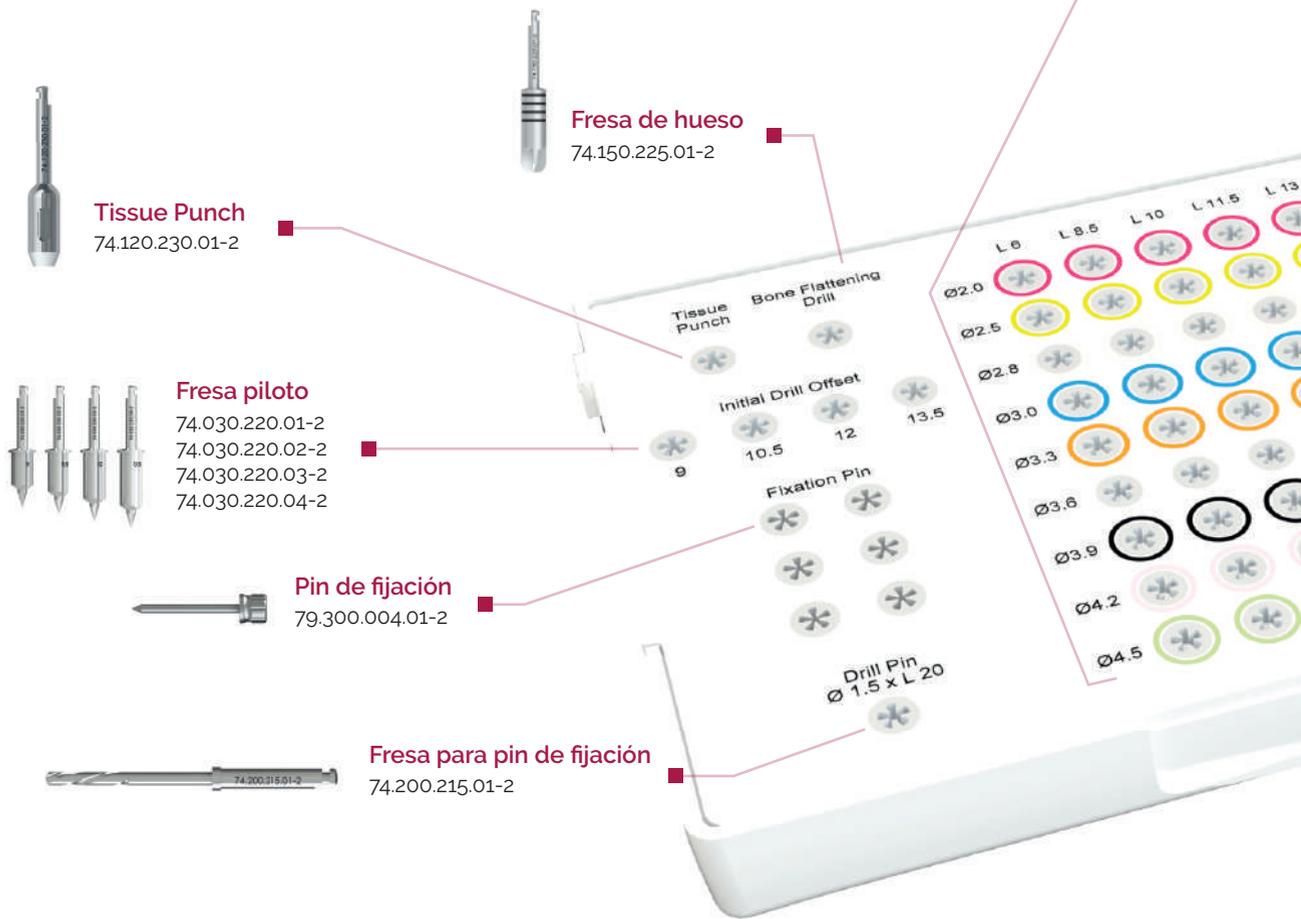

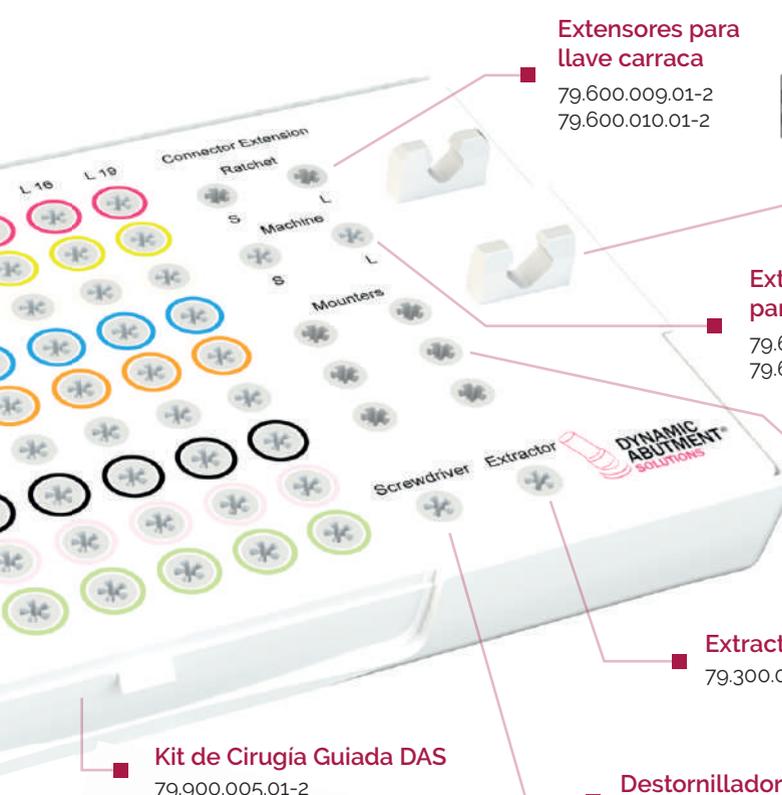

Extensores para llave carraca

79.600.009.01-2
79.600.010.01-2



Llave dinamométrica manual universal

11.990.990.07-2

Extensores para motor

79.600.007.01-2
79.600.008.01-2



Transportadores de implantes

75.xxx.xxx.48-2*



*En función de la compatibilidad

Extractor

79.300.001.02-2



Destornillador Hex. 1,2

43.601.103.02-2



Kit de Cirugía Guiada DAS

79.900.005.01-2






Tissue Punch

74.120.230.01-2

El bisturí circular se utiliza para realizar una **incisión circular** mínimamente invasiva en el tejido blando que rodea cada posición de implante planificada. Esta herramienta crea una mucotomía de 3 mm de diámetro antes del uso de las fresas cuando se emplee una técnica quirúrgica sin colgajo.

Se trata de un único **bisturí cilíndrico** y se guía directamente a través del cilindro guía. En caso de que exista poco tejido gingival queratinizado, no se recomienda utilizar el bisturí circular, sino levantar un colgajo alineado con la posición del implante.

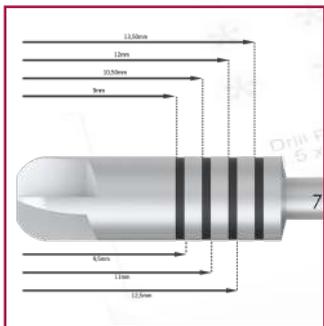

Las rayas negras indican el offset



Fresa de hueso


74.150.225.01-2


La fresa para alisado óseo se utiliza para aplanar la superficie de la **cresta alveolar**. Se elimina el tejido blando restante de la cresta alveolar tras utilizar el bisturí circular.

Fresa piloto

La fresa piloto **retira la mucosa** cortada durante la mucotomía y **prepara el hueso** cortical para el paso de la primera fresa. La fresa piloto tiene marcados el offset y la referencia y siempre se guía directamente a través del cilindro guía.

Offsets disponibles: 9 / 10,5 / 12 / 13,5 (mm)

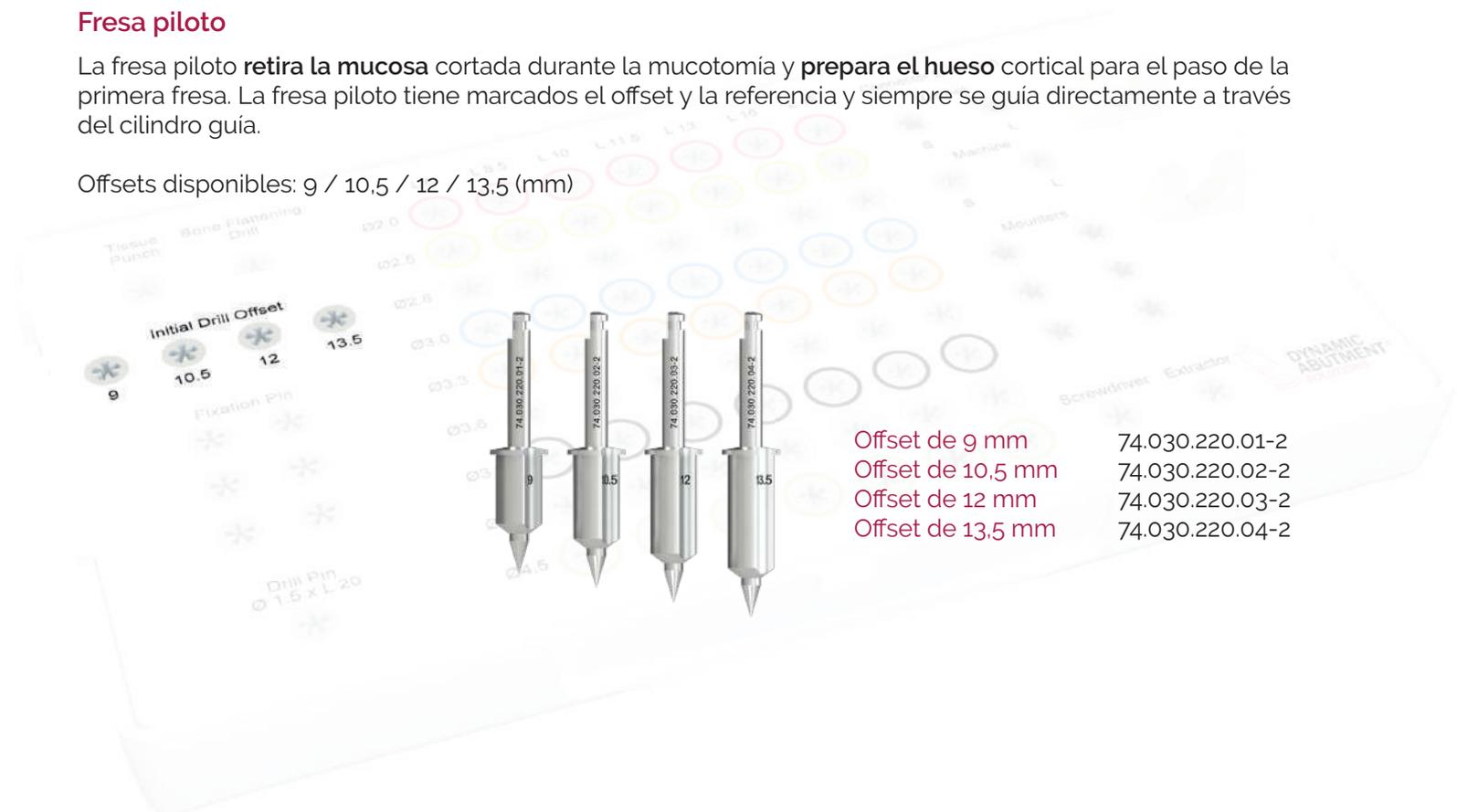

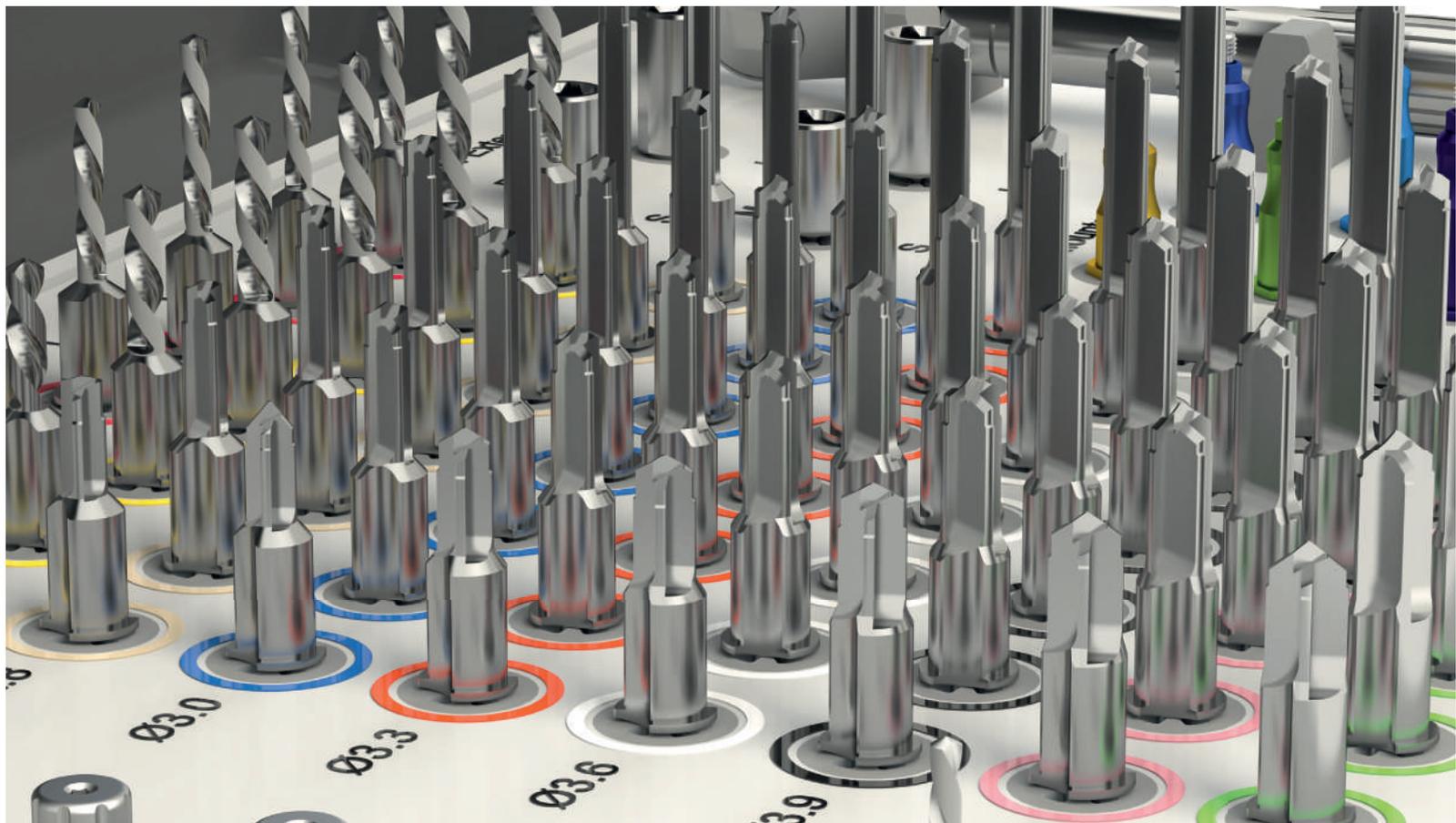


Fresas

Los topes integrados garantizan un fresado preciso y seguro hasta la profundidad deseada. Los **distintos diámetros y longitudes** de las fresas permiten a los profesionales sanitarios planificar y decidir cuál es la mejor solución antes de iniciar la intervención quirúrgica.

El Kit de Cirugía Guiada DAS es intuitivo, sencillo y cómodo, Permite llevar a cabo intervenciones de un modo lógico y fácil. Es necesario **consultar nuestro catálogo** para ver las compatibilidades y la posición del implante, en función de las necesidades de cada caso. Cada offset requiere unas longitudes de fresa distintas.

Diámetros de la fresa: 2 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,3 / 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 (mm)

Longitudes de la fresa: 6 / 8,5 / 10 / 11,5 / 13 / 16 / 19 (mm)

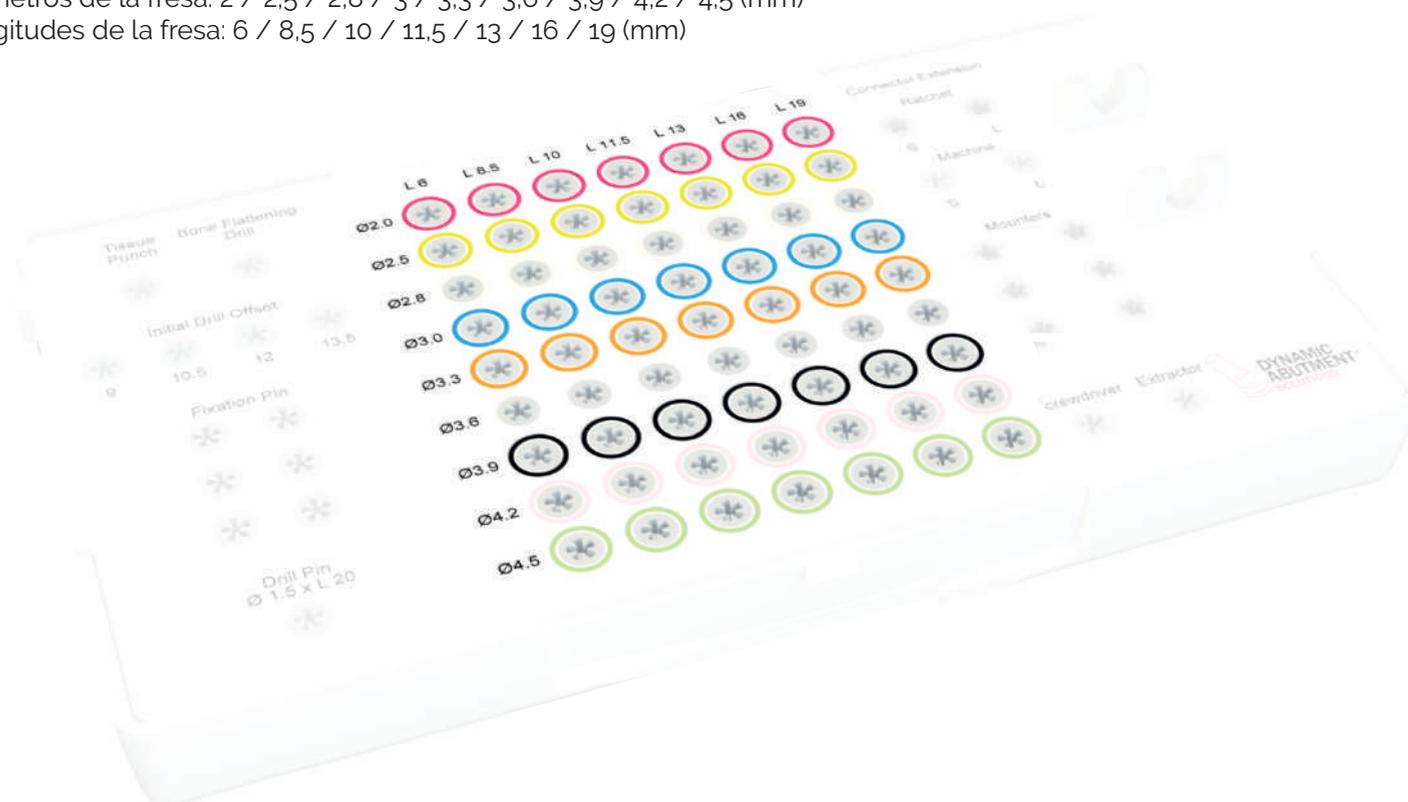

74.xxx.220.01-2*



74.xxx.225.01-2*



74.xxx.228.01-2*



74.xxx.230.01-2*



74.xxx.233.01-2*



74.xxx.236.01-2*



74.xxx.239.01-2*



74.xxx.242.01-2*



74.xxx.245.01-2*




*xxx: longitud de la fresa (LF)

KIT DE CIRUGÍA GUIADA

| Ø FRESA | | TL (longitud total) | LF (longitud de fresa) | Ref. |
|---------|------|---------------------|------------------------|------|
| Ø 2,0 | 15 | 6 | 74.060.220.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.220.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.220.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.220.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.220.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.220.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.220.01-2 | |
| Ø 2,5 | 15 | 6 | 74.060.225.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.225.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.225.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.225.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.225.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.225.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.225.01-2 | |
| Ø 2,8 | 15 | 6 | 74.060.228.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.228.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.228.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.228.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.228.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.228.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.228.01-2 | |
| Ø 3,0 | 15 | 6 | 74.060.230.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.230.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.230.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.230.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.230.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.230.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.230.01-2 | |
| Ø 3,3 | 15 | 6 | 74.060.233.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.233.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.233.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.233.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.233.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.233.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.233.01-2 | |

| Ø FRESA | | LT (Longitud total) | LF (longitud de fresa) | Ref. |
|---------|------|---------------------|------------------------|------|
| Ø 3,6 | 15 | 6 | 74.060.236.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.236.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.236.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.236.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.236.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.236.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.236.01-2 | |
| Ø 3,9 | 15 | 6 | 74.060.239.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.239.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.239.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.239.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.239.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.239.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.239.01-2 | |
| Ø 4,2 | 15 | 6 | 74.060.242.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.242.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.242.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.242.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.242.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.242.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.242.01-2 | |
| Ø 4,5 | 15 | 6 | 74.060.245.01-2 | |
| | 17,5 | 8,5 | 74.085.245.01-2 | |
| | 19 | 10 | 74.100.245.01-2 | |
| | 20,5 | 11,5 | 74.115.245.01-2 | |
| | 22 | 13 | 74.130.245.01-2 | |
| | 25 | 16 | 74.160.245.01-2 | |
| | 28 | 19 | 74.190.245.01-2 | |

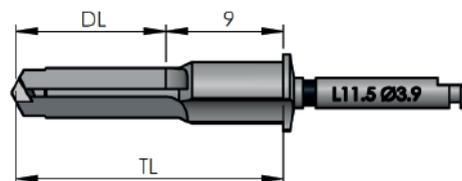



COMPONENTES DEL KIT

FRESAS Y PINES DE FIJACIÓN



Pin de fijación

79.300.004.01-2


El pin de fijación sujeta la guía quirúrgica en la **posición deseada**. El pin debe introducirse totalmente por el casquillo.



Fresa para fijación

74.200.215.01-2

La fresa para fijación tiene una **punta cortante y bordes biselados**. Esta fresa debe pasar completamente a través del casquillo para garantizar que el pin quede bien sujeto.

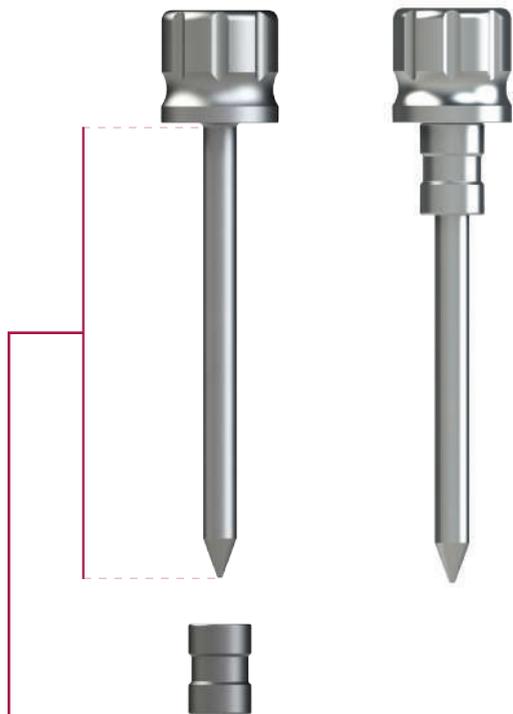

Un **único pin de fijación** de 1,5 mm de diámetro y 20 mm de longitud.

Anchor Pin

79.300.004.01-2

El pin de fijación sujeta la guía quirúrgica en la **posición deseada**. El pin debe introducirse totalmente por la anilla.

Una única anilla con un diámetro interior de 1,5 mm.



Anilla de fijación DAS

71.340.153.01-2

Piezas cilíndricas que se incorporan a la férula para permitir la **colocación** de los pines de fijación.




Anchor Drill


74.200.215.01-2

La fresa para fijación tiene una punta cortante y bordes biselados. Esta fresa debe pasar completamente **a través de la anilla** para garantizar que el pin quede bien sujeto.

Una única fresa de 20 mm de longitud y 1,5 mm de diámetro.

FRESAS

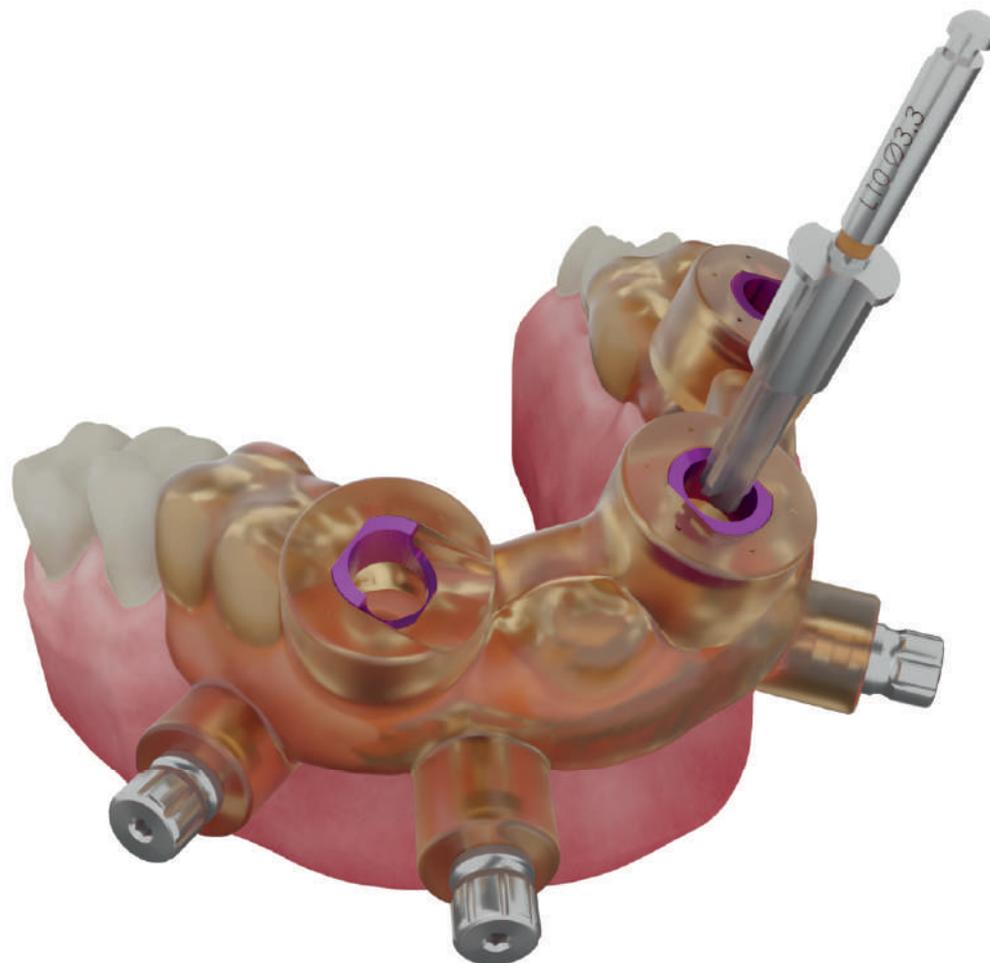

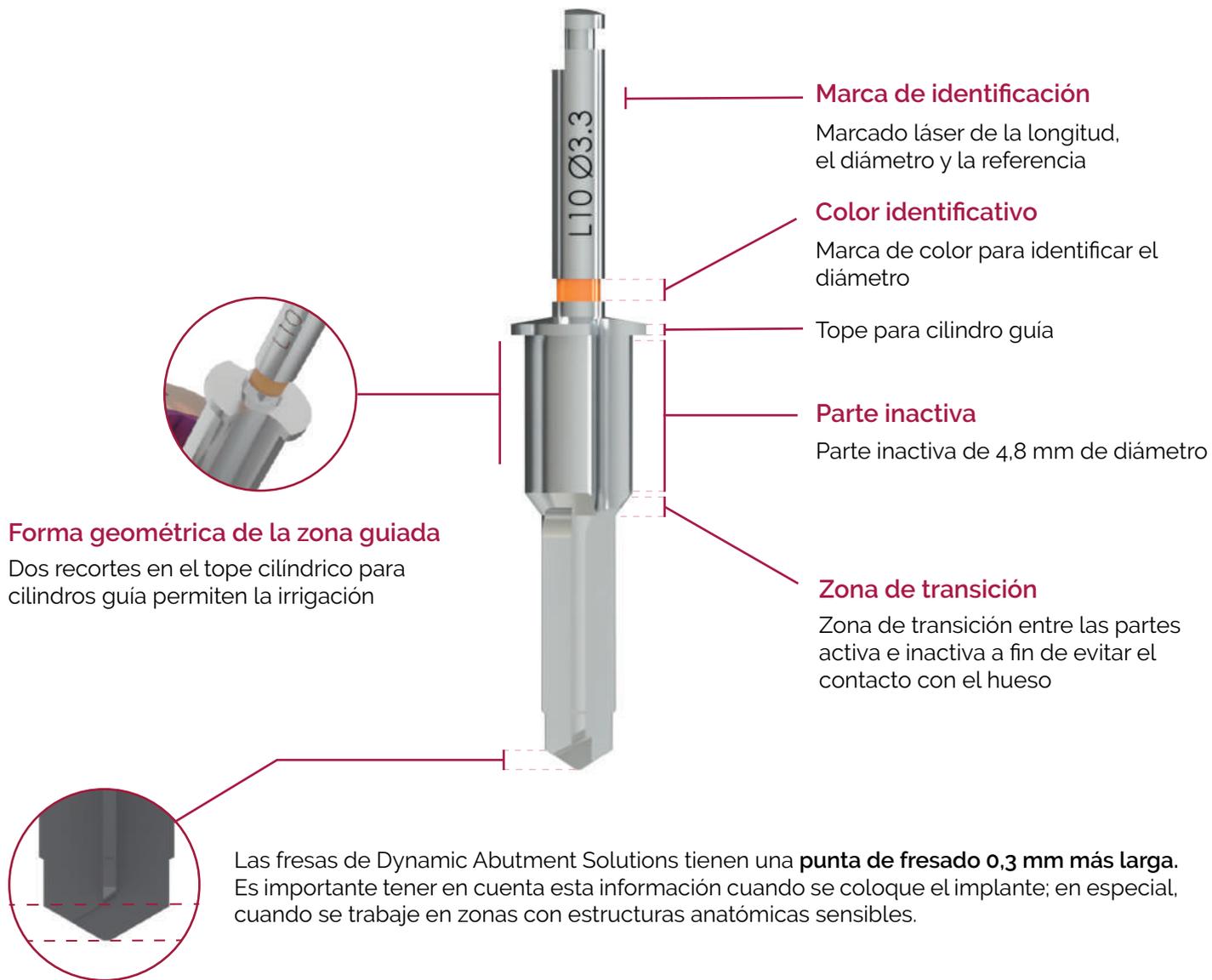

Forma geométrica de la zona guiada

Dos recortes en el tope cilíndrico para cilindros guía permiten la irrigación

Marca de identificación

Marcado láser de la longitud, el diámetro y la referencia

Color identificativo

Marca de color para identificar el diámetro

Tope para cilindro guía

Parte inactiva


Parte inactiva de 4,8 mm de diámetro

Zona de transición

Zona de transición entre las partes activa e inactiva a fin de evitar el contacto con el hueso

Las fresas de Dynamic Abutment Solutions tienen una **punta de fresado 0,3 mm más larga**. Es importante tener en cuenta esta información cuando se coloque el implante; en especial, cuando se trabaje en zonas con estructuras anatómicas sensibles.


ANILLAS

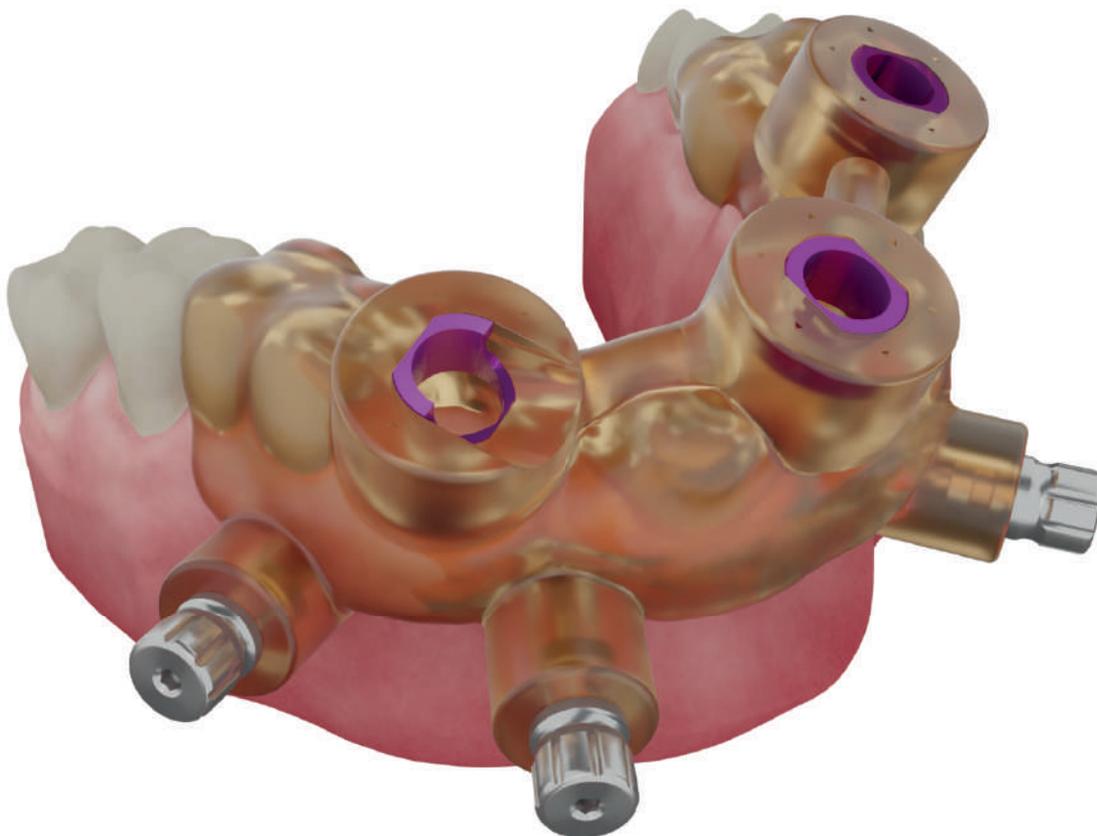

Anilla DAS

71.340.485.01-2

Una vez fijado a la guía quirúrgica, permite realizar la **secuencia de fresado** guiado y **colocar el implante** en la posición planificada.

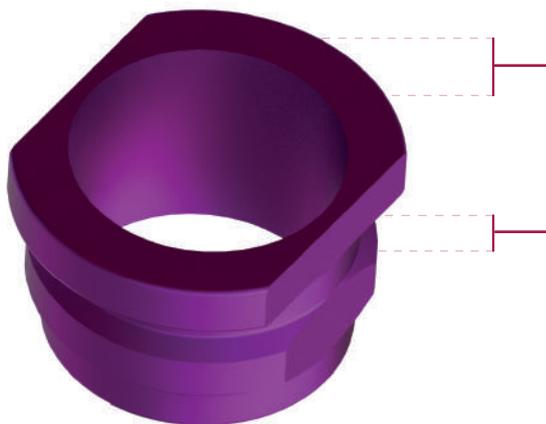


Diámetro interior ajustado a las fresas y los transportadores de implantes

Dos **cortes laterales** para fijar la anilla en una posición y servir de referencia para la dirección de la conexión del implante

Anilla recortada DAS

71.340.485.02-2


La anilla recortada ofrece acceso mesial para aquellos casos en que resulte complicado introducir las fresas desde arriba. La **apertura lateral** permite acceder más fácilmente en zonas en las que la longitud de las fresas pudiera suponer un obstáculo. Gracias a la apertura lateral, que también se ha impreso en la guía, **es posible introducir las fresas lateralmente**.

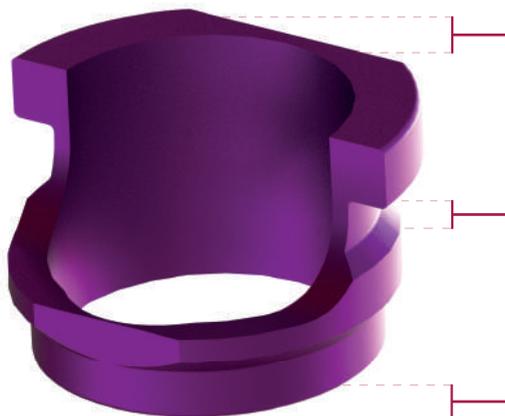

Diámetro interior ajustado a las fresas y los transportadores de implantes


Dos **cortes laterales** para fijar la anilla en una posición y servir de referencia para la dirección de la conexión del implante


Acceso lateral que ofrece una mayor comodidad y facilita la cirugía guiada cuando no se dispone de espacio suficiente

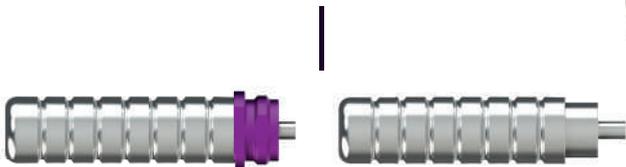

*Utilizar la pieza de sujeción de la anilla de Dynamic Abutment Solutions (79.300.003.02-2) para introducir la anilla en la guía quirúrgica.

TRANSPORTADORES DE IMPLANTES

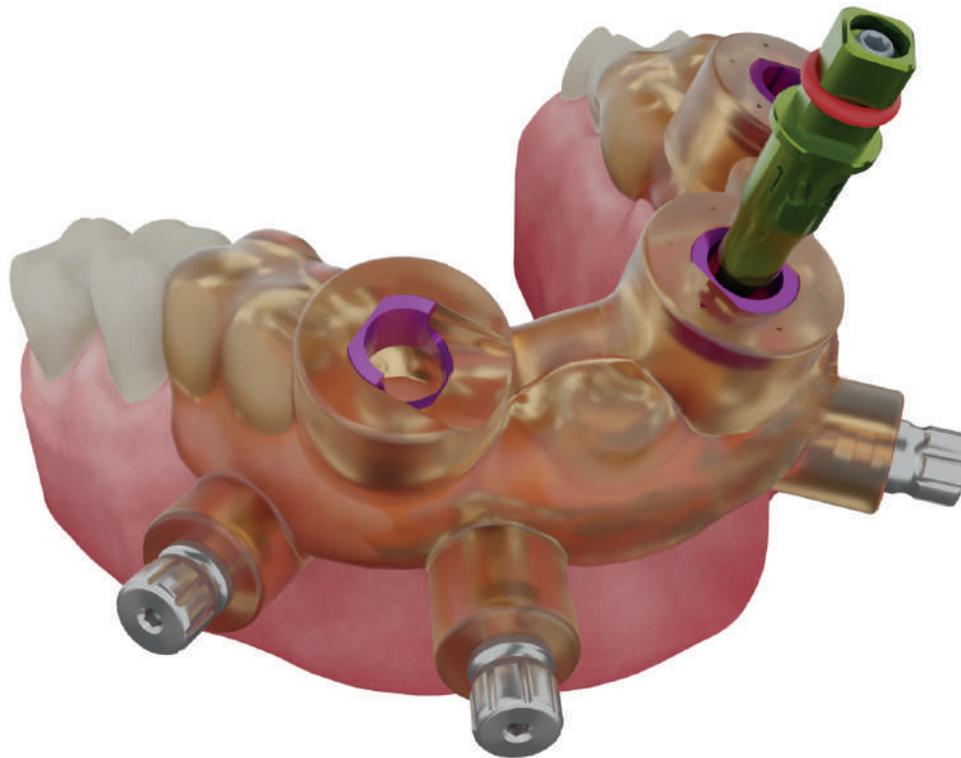

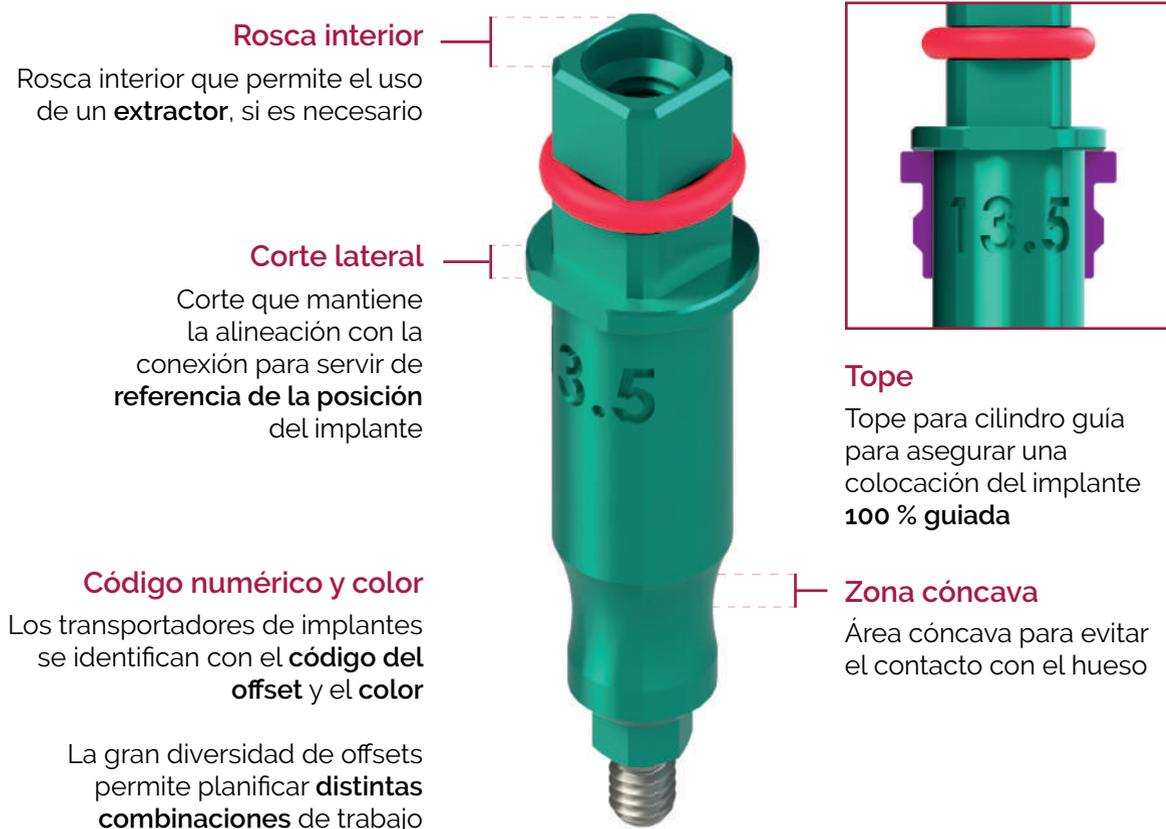

Rosca interior

Rosca interior que permite el uso de un **extractor**, si es necesario

Corte lateral

Corte que mantiene la alineación con la conexión para servir de **referencia de la posición** del implante

Código numérico y color

Los transportadores de implantes se identifican con el **código del offset** y el **color**

La gran diversidad de offsets permite planificar **distintas combinaciones** de trabajo



Tope

Tope para cilindro guía para asegurar una colocación del implante **100 % guiada**

Zona cóncava

Área cóncava para evitar el contacto con el hueso


Transportador

El transportador de implante se conecta al implante mediante un **tornillo de sujeción** y va en la dirección y hasta la profundidad del implante a través de la guía quirúrgica.

Gracias a los recortes laterales en el tope del transportador de implante, también puede comprobar la posición de la conexión del implante a través de la guía quirúrgica.

Distintos offsets disponibles

Consultar el documento «Offsets de trabajo según la compatibilidad» para encontrar la correspondiente información en el catálogo de Dynamic Abutment Solutions.

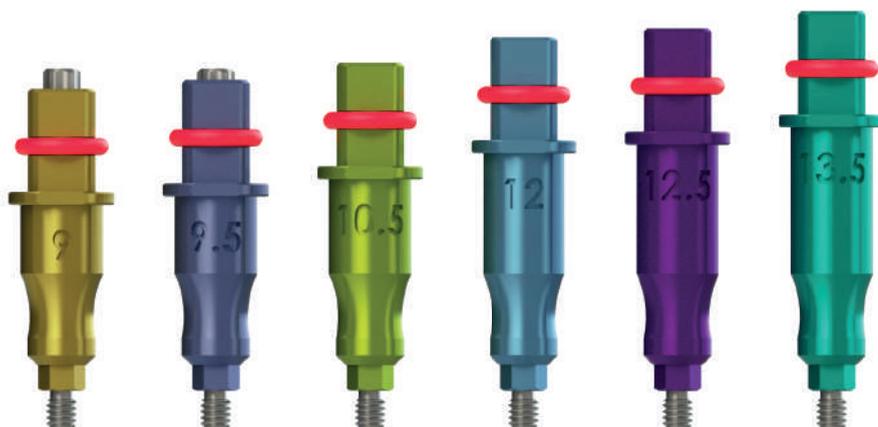


*Ejemplo: Alphabio Internal Hex

Colores de los transportadores de implantes según el offset

| |
|------|
| 9 |
| 9,5 |
| 10 |
| 10,5 |
| 11 |
| 11,5 |
| 12 |
| 12,5 |
| 13 |
| 13,5 |


El transportador de implante se encuentra anodizado según el offset con el fin de facilitar su identificación durante la cirugía.

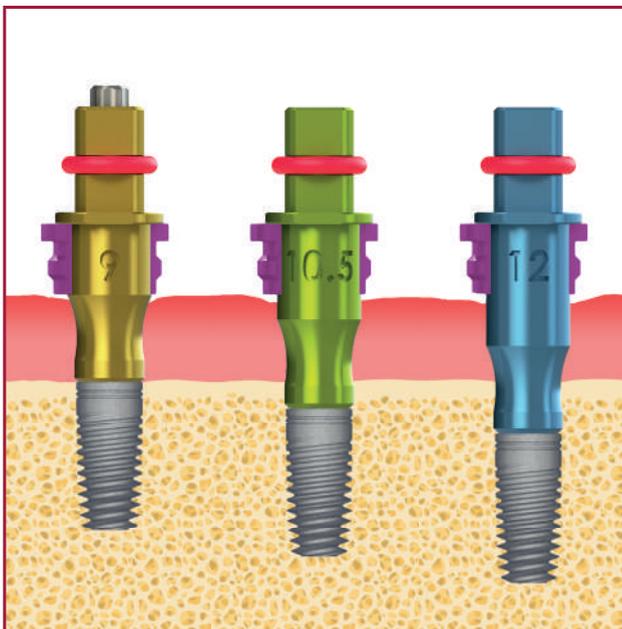


*Ejemplo de Alphabio Internal hex, con una longitud de implante de 10 mm.


Distintos offsets disponibles

Cada uno de los implantes tiene distintos offsets de trabajo, a fin de que los cilindros guía puedan colocarse en el implante en la posición de trabajo deseada.

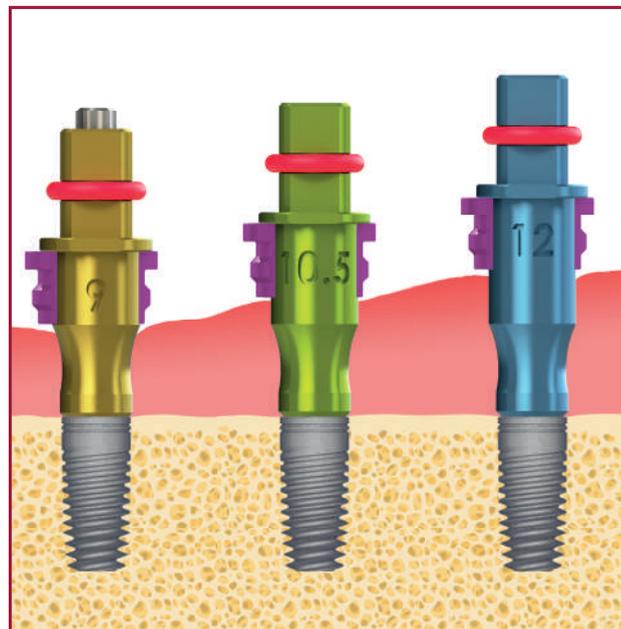


PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA 100% GUIADA

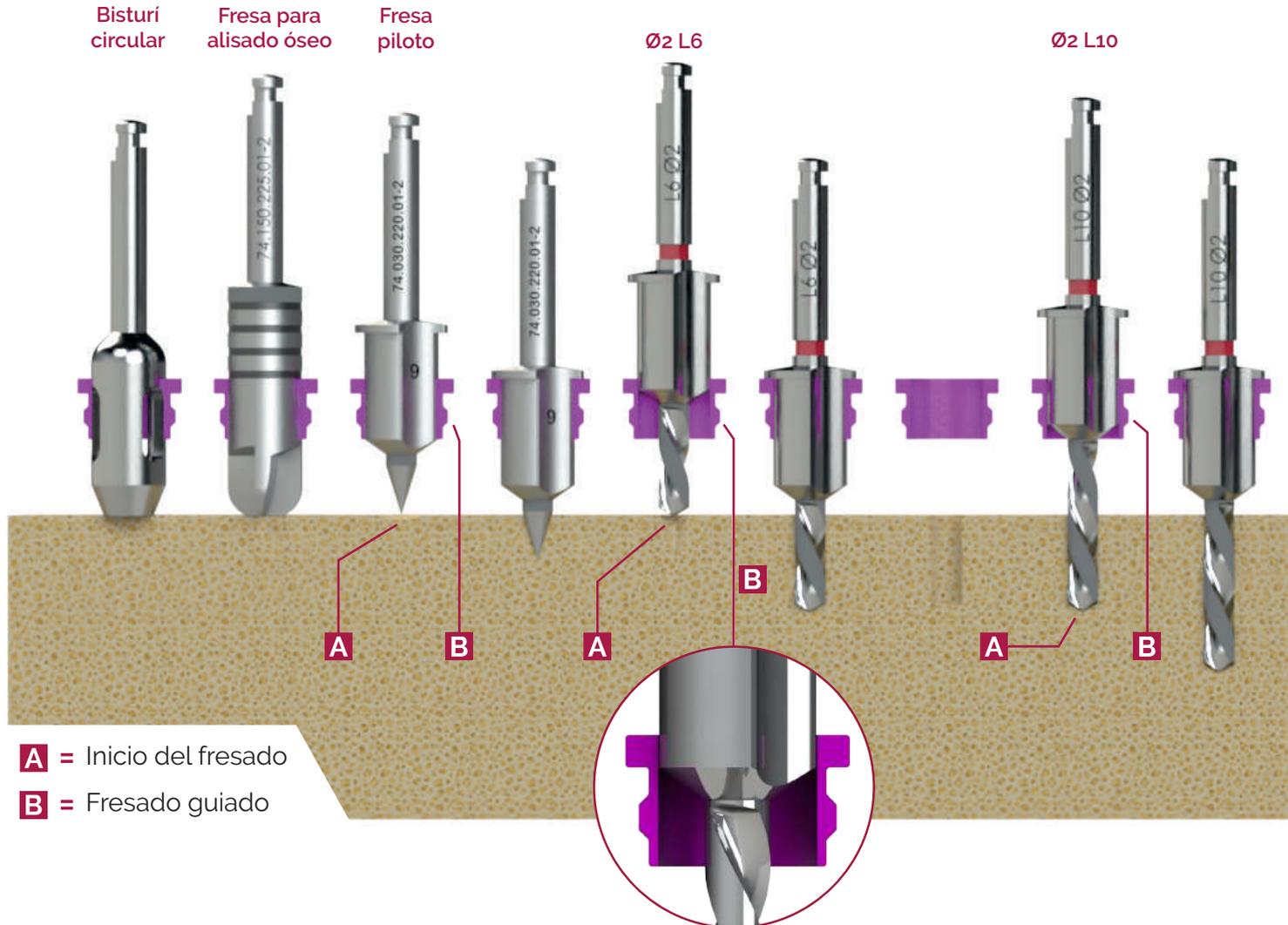

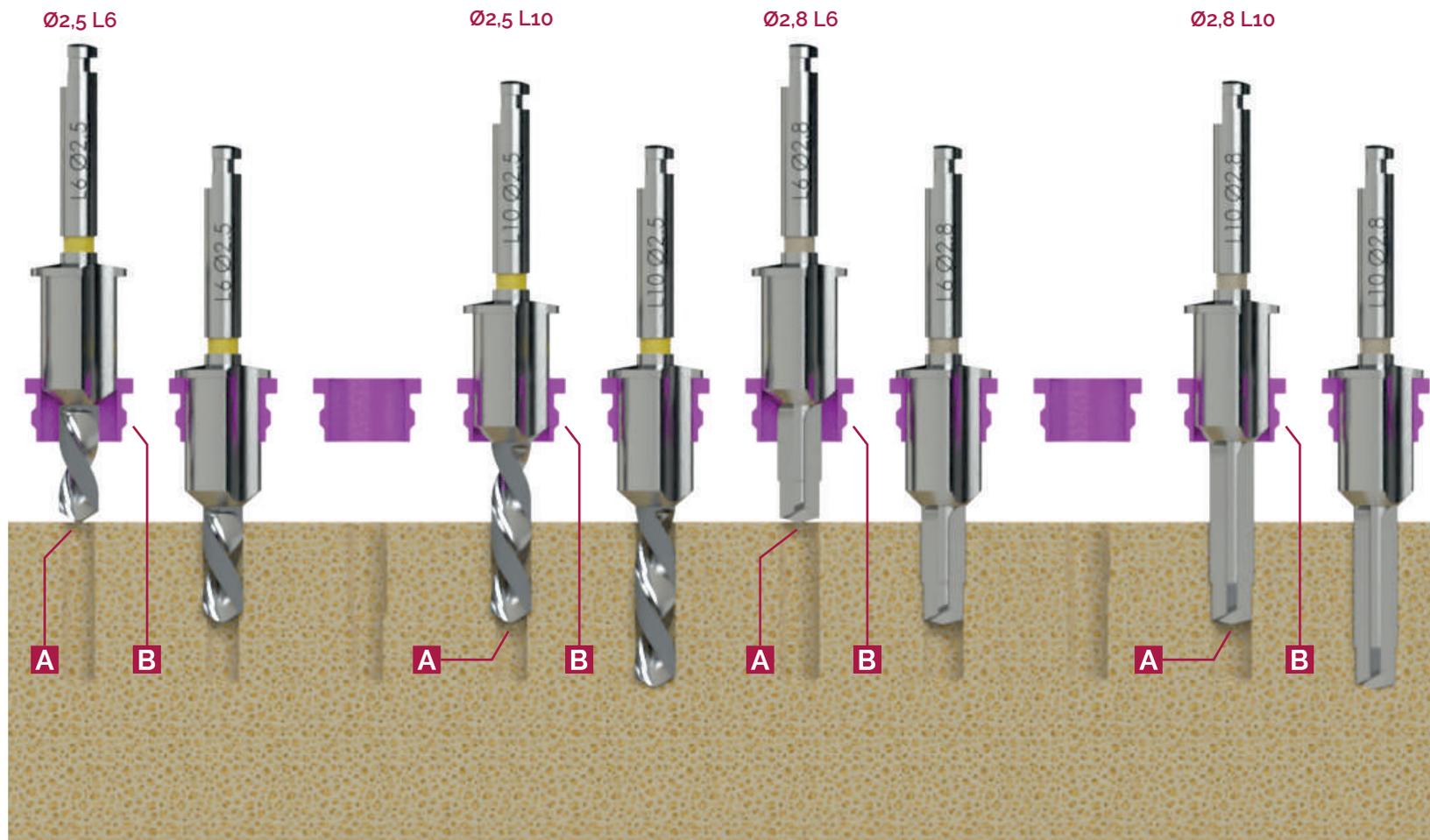


EJEMPLO DE SECUENCIA DE FRESADO

Secuencia de fresado para Bone Level implant $\varnothing 3,5 \times L10$

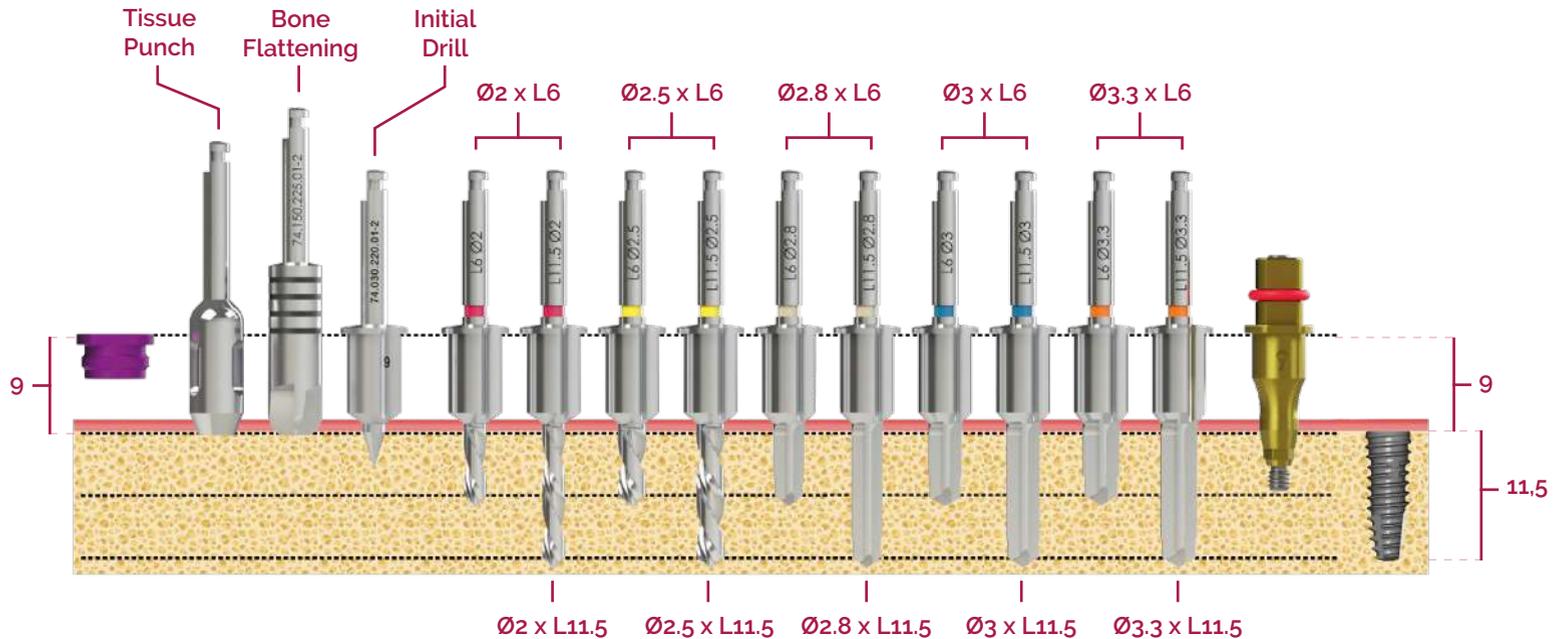

Dependiendo de la **densidad ósea** (detectable incluso mediante las funciones de diagnóstico del software), el profesional sanitario puede decidir cuál será el diámetro de la fresa final, en función de su propia **experiencia clínica** y de la **forma geométrica** del implante, ya que puede optar por infrapreparar el lecho quirúrgico con el fin de **aumentar la estabilidad** del implante.


Secuencia de fresado para Bone Level implant $\varnothing 4.0 \times L10$

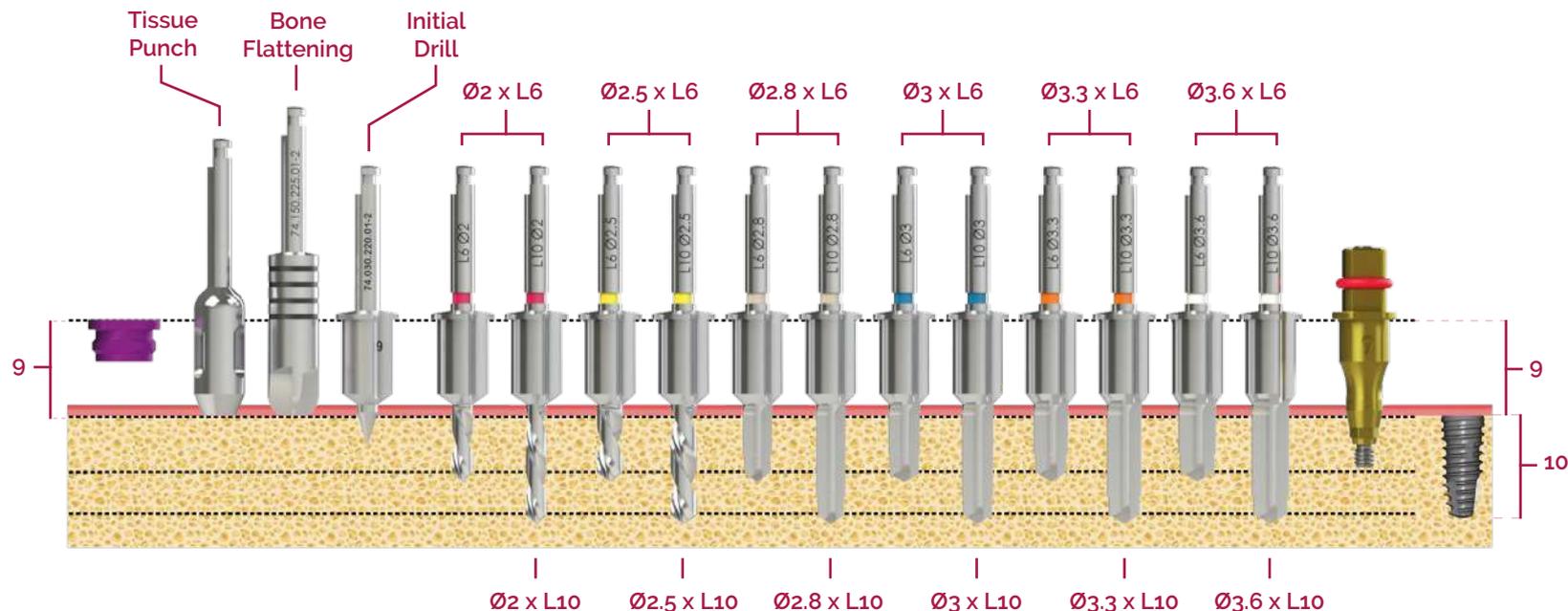

Dependiendo de la **densidad ósea** (detectable incluso mediante las funciones de diagnóstico del software), el profesional sanitario puede decidir cuál será el diámetro de la fresa final, en función de su propia **experiencia clínica** y de la **forma geométrica** del implante, ya que puede optar por infrapreparar el lecho quirúrgico con el fin de **aumentar la estabilidad** del implante.

MISMA CONEXIÓN, DIFERENTE MONTURA DE IMPLANTE


*Un ejemplo usando hexágono interno compatible con 0040

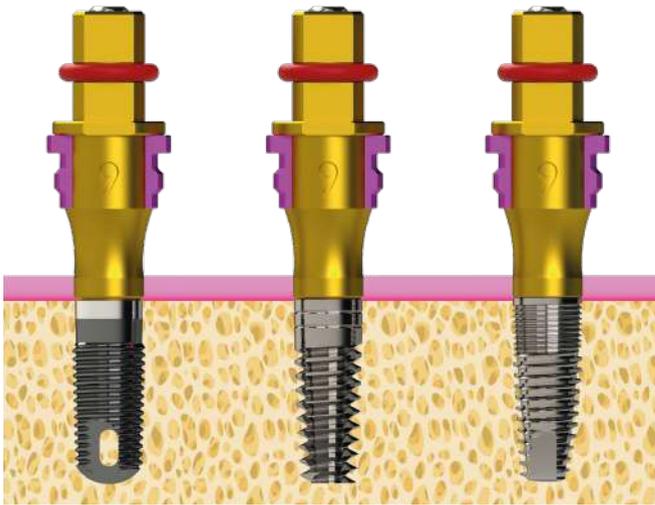

**ZIMMER
SCREW/VENT**
3,5

**ALPHABIO
DFI**
3,3

**CORTEX
CLASSIX**
3,8

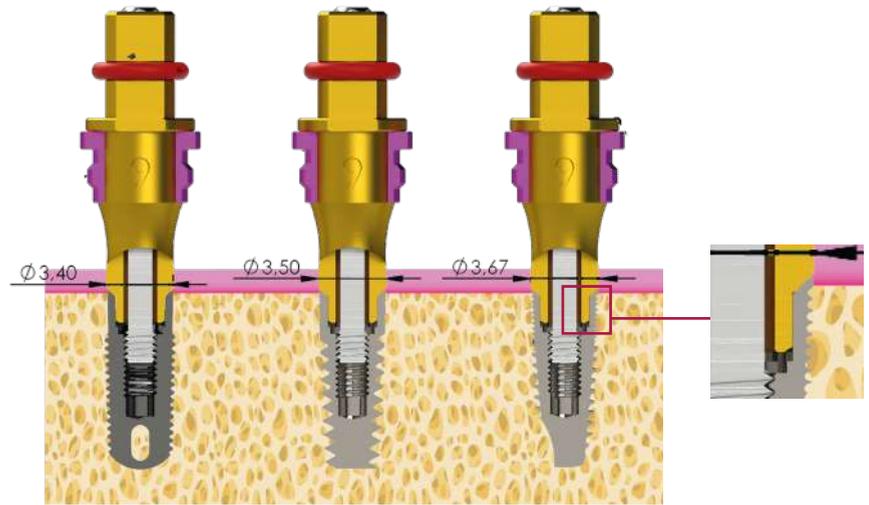

**ZIMMER
SCREW/VENT**
3,5

**ALPHABIO
DFI**
3,3

**CORTEX
CLASSIX**
3,8


Transportador Zimmer con:

ZIMMER |
ALPHABIO | — Mismo hexágono interno
CORTEX | — Misma conexión

El mismo transportador es simulado para cada implante

ZIMMER |
ALPHABIO | — El cierre de cada implante
CORTEX | — es diferente

Offset gmm → ZIMMER → OK
Planificación
Ejecución final

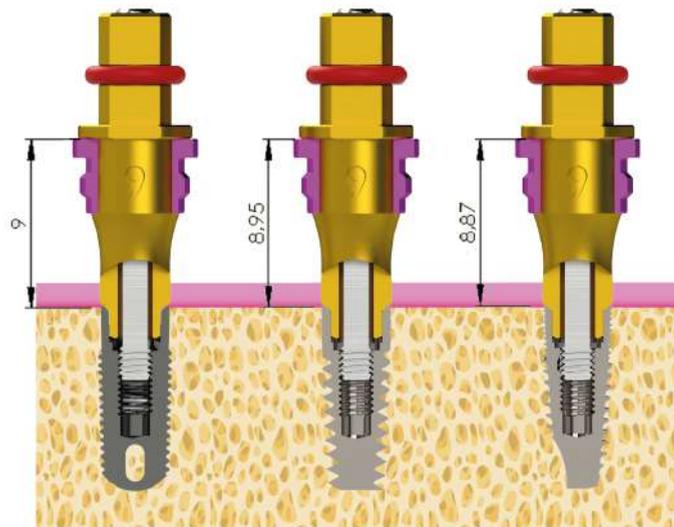

ZIMMER
SCREWVENT
3,5

ALPHABIO
DFI
3,3

CORTEX
CLASSIX
3,8



Cuando el cierre es diferente → Cada implante necesita un transportador diferente

EXTENSORES



Extensores corto y largo para llave de carraca

79.600.009.01-2 (corta)

79.600.010.01-2 (larga)

Extensores para la conexión entre la llave dinamo-métrica y el transportador del implante.




Extensores corto y largo para máquina

79.300.007.01-2 (corta)

79.300.008.01-2 (larga)

Conector para guiar el transportador del implante mediante una pieza de mano quirúrgica.

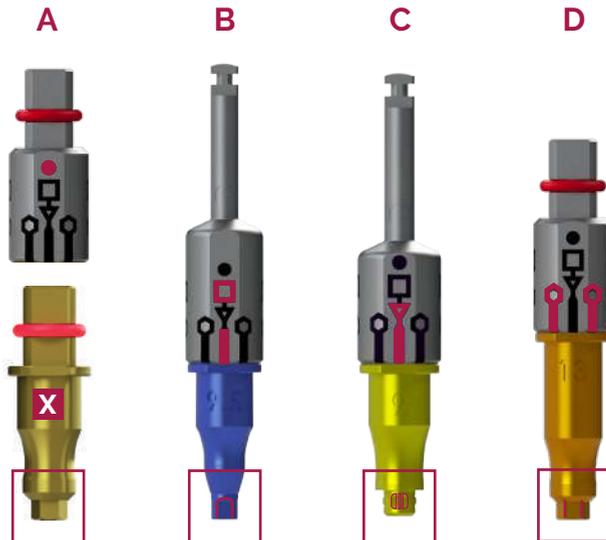

La cara del extensor grabada con un punto (A) debe alinearse con la cara de la montura grabada con el offset número (X).

4 Conexiones de caras: el grabado (B) en el extensor. Esto indica la posición de las 4 caras de la conexión del implante.

3 Conexiones de caras: el grabado (C) en el extensor. Esto indica la posición de las 3 caras de la conexión del implante.

6 Conexiones de aristas: el grabado (D) en el extensor. Esto indica la posición de las 6 aristas de la conexión del implante.

DESTORNILLADOR Y EXTRACTOR



Destornillador Hex.1,2

43.601.103.02-2

Destornillador para apretar el tornillo del transportador del implante y otros tornillos hexagonales de 1,20 mm.





Extractor

79.300.001.01-2



Esta herramienta se debe utilizar para separar el transportador del implante en aquellos casos en los que quede atascado, siguiendo para ello estas instrucciones:

- Destornillar el tornillo del transportador del implante y extraerlo.
- Atornillar el extractor al transportador del implante para soltarlo del implante.

LIBRERÍAS

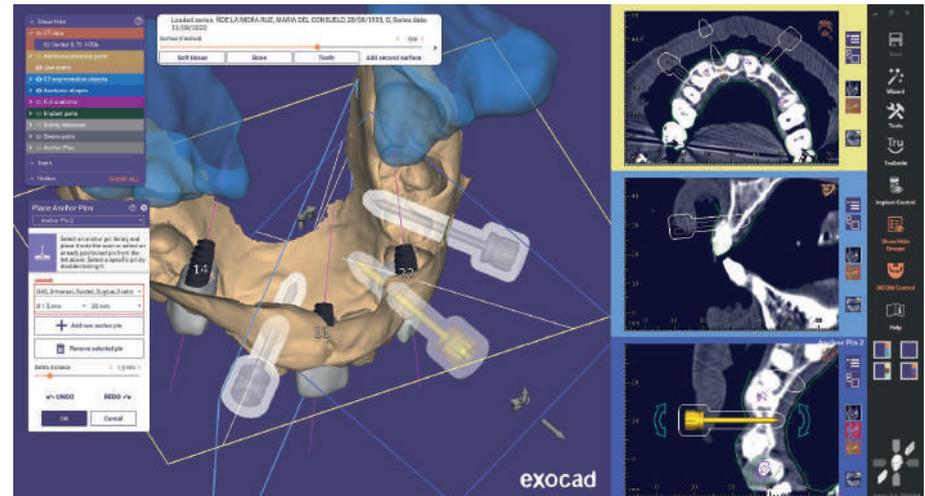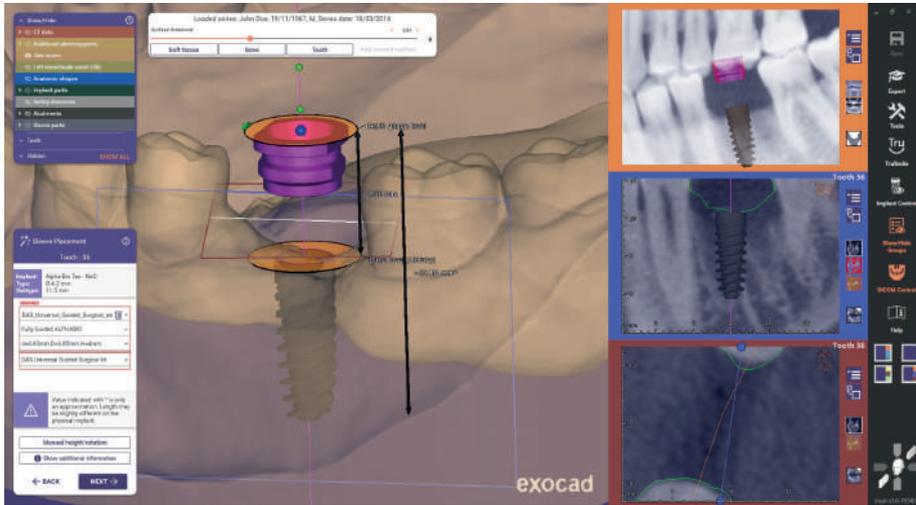



Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com

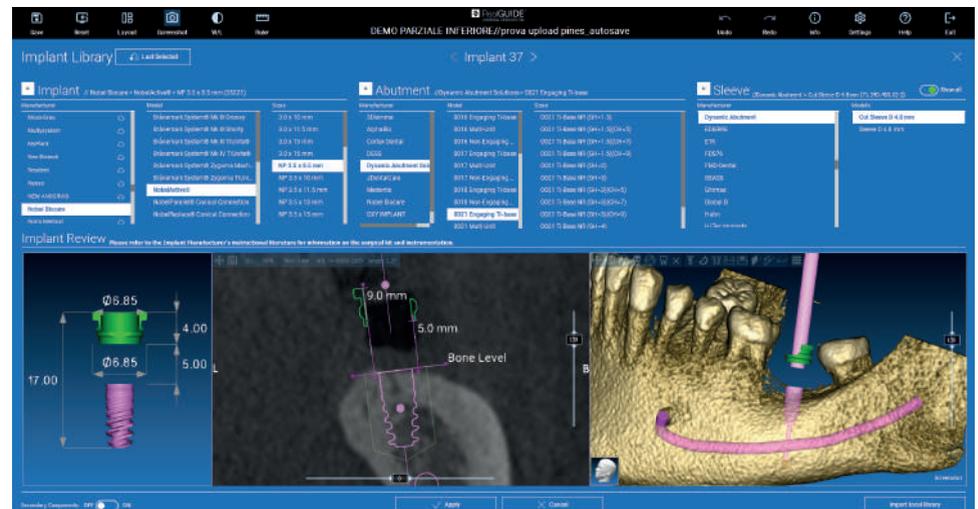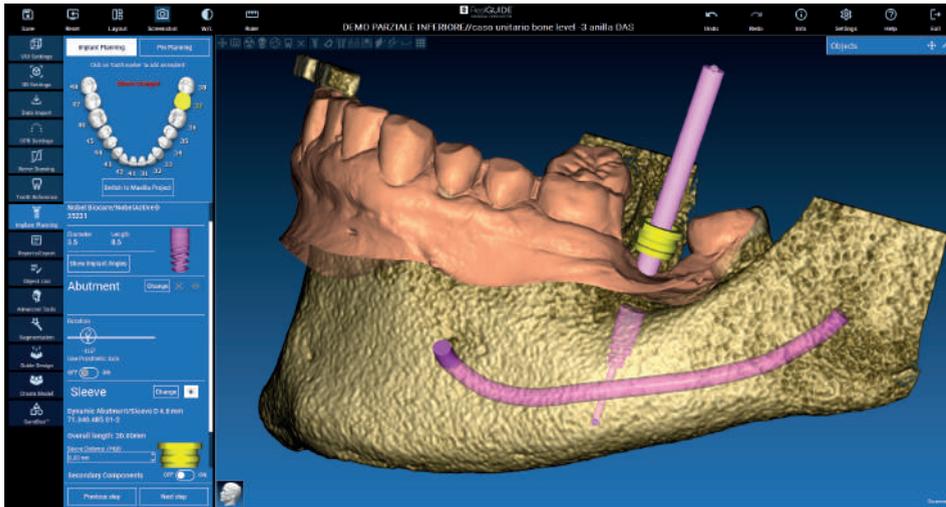

Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com



3shape

Implant Studio

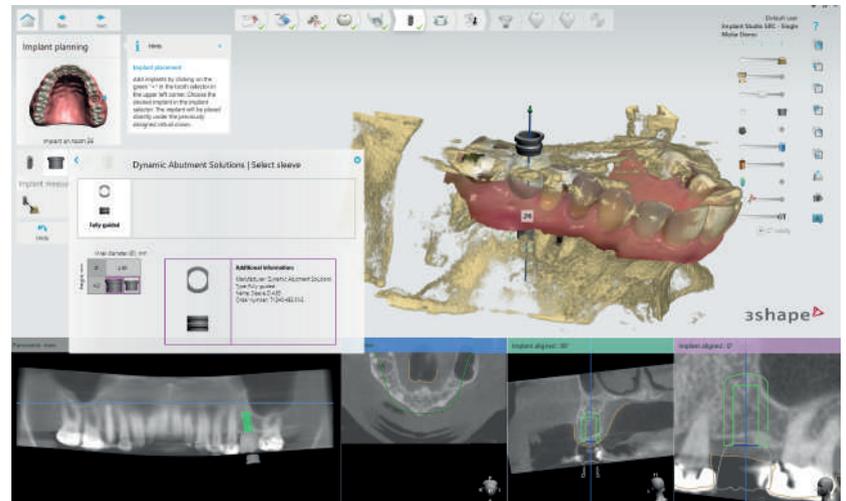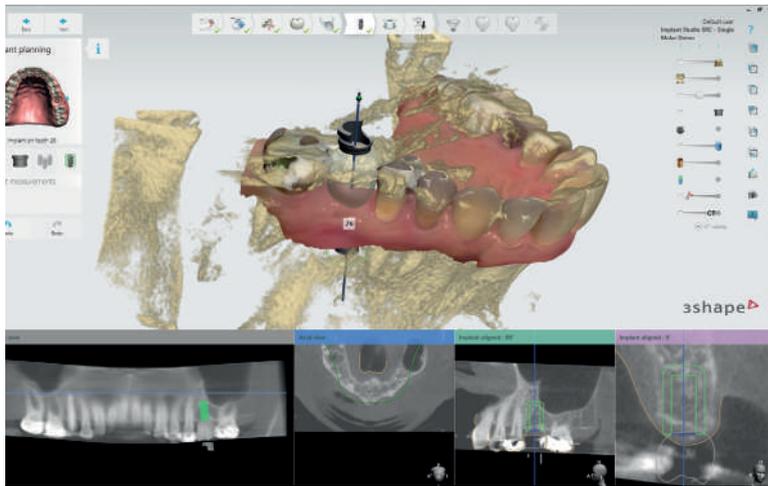



Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com

LIBRERÍAS

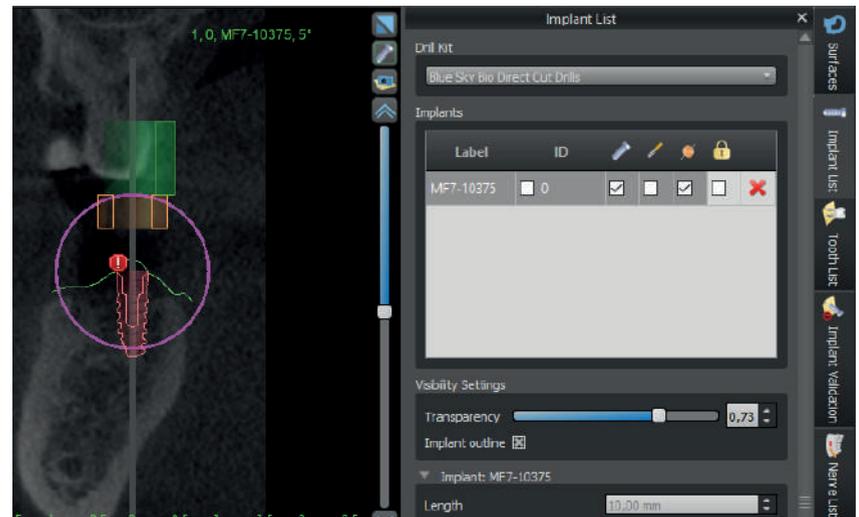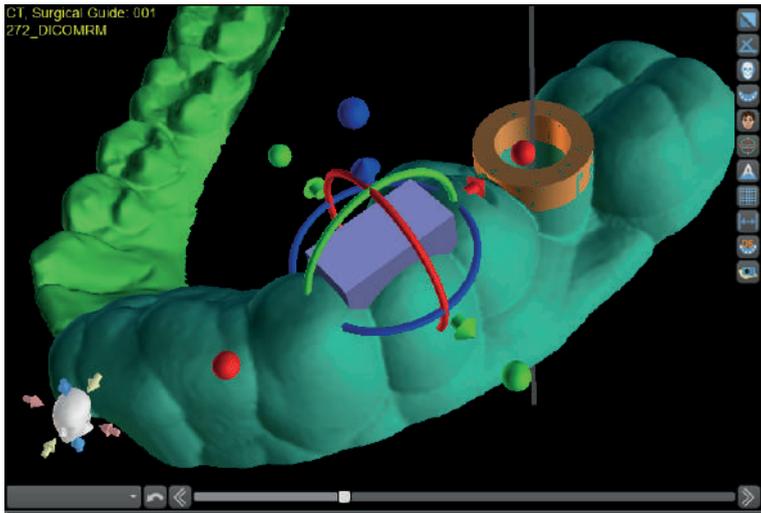



Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com

LIBRERÍAS

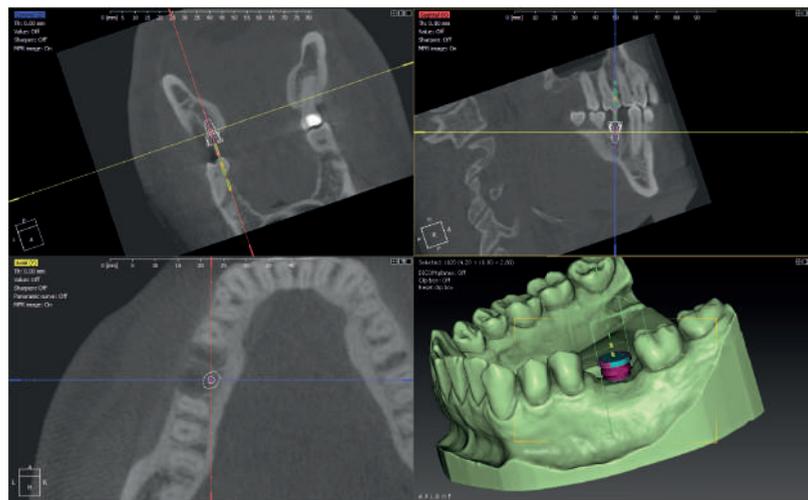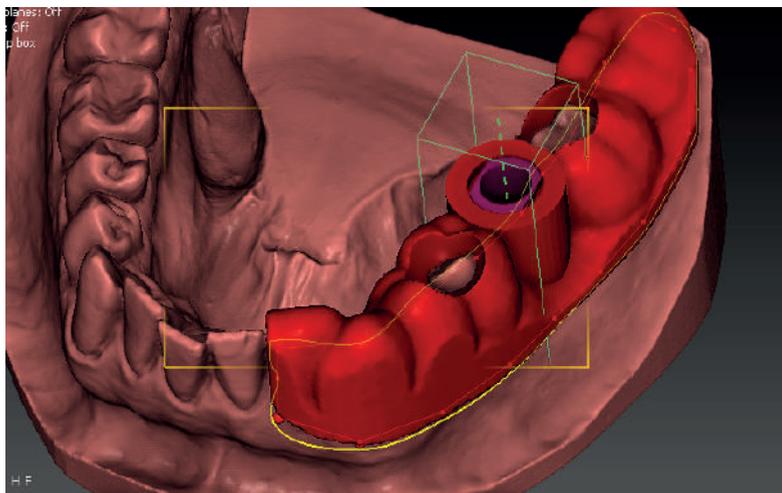

Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com



LIBRERÍAS

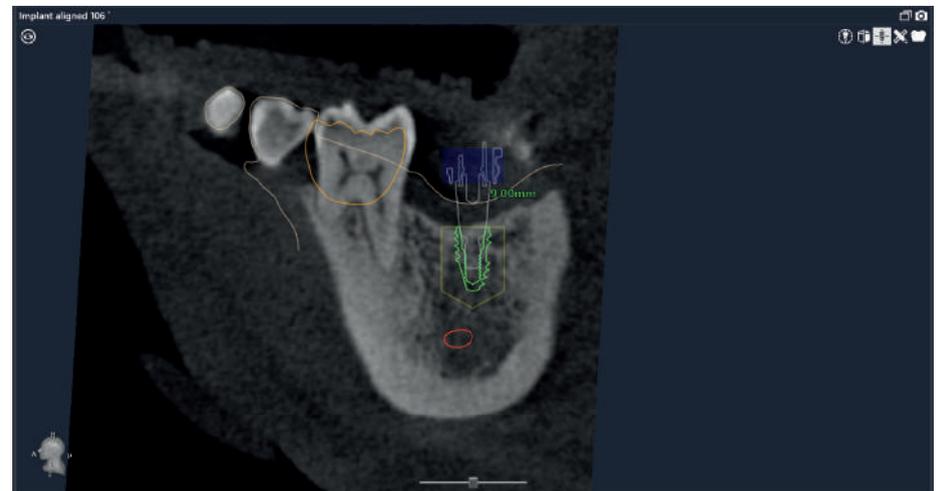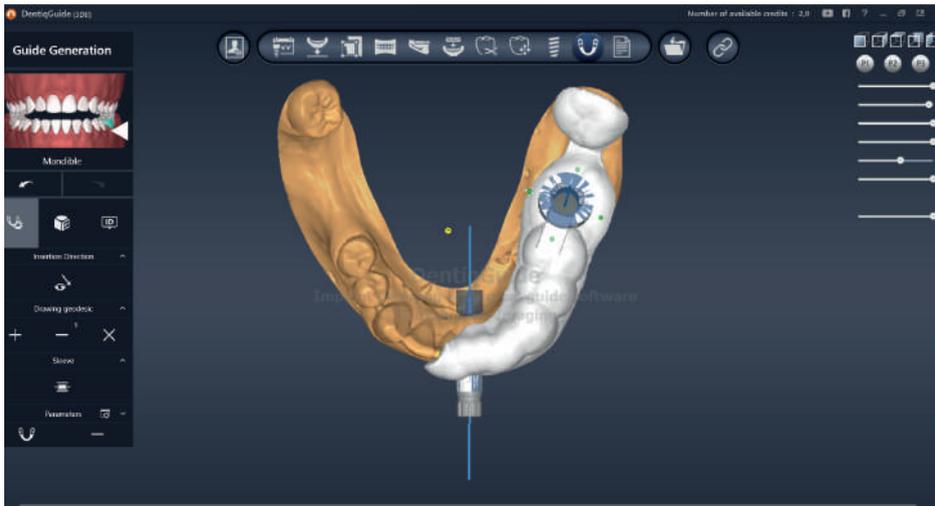

Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com

coDiagnostiX[®]



Implant Planning Software

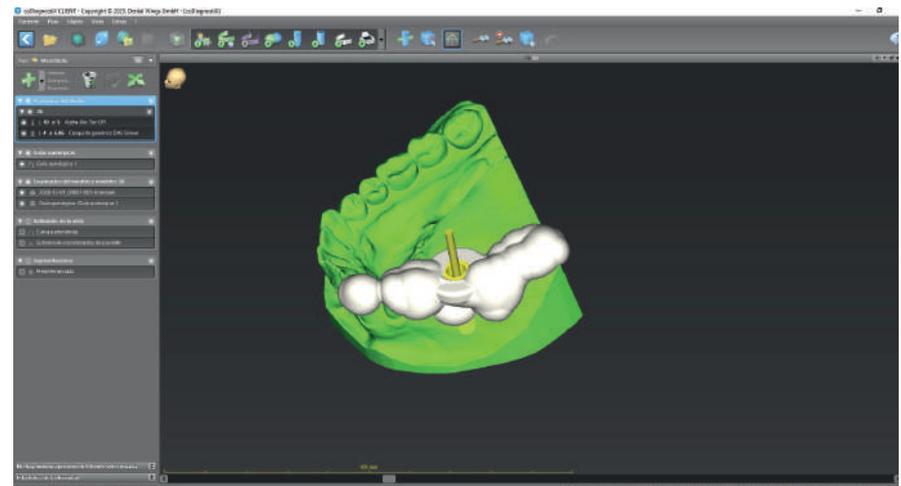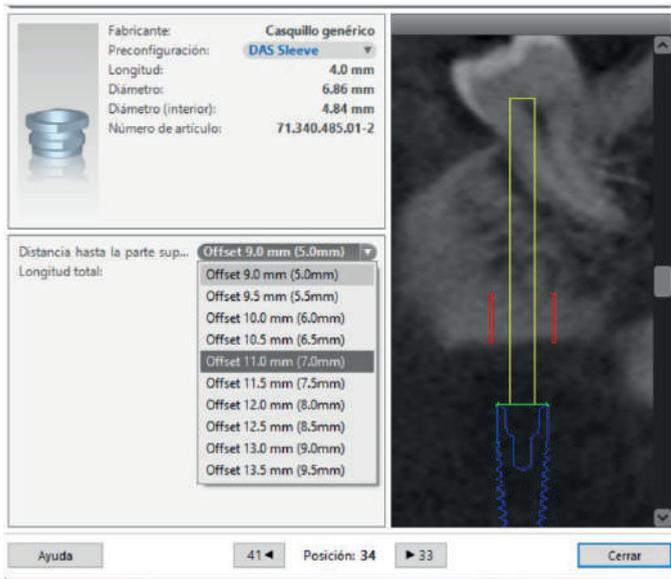


Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com



ImplaStation

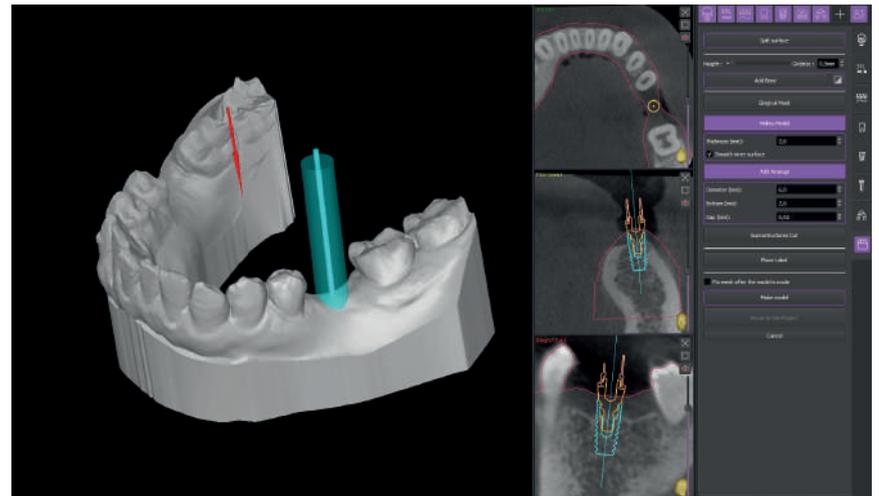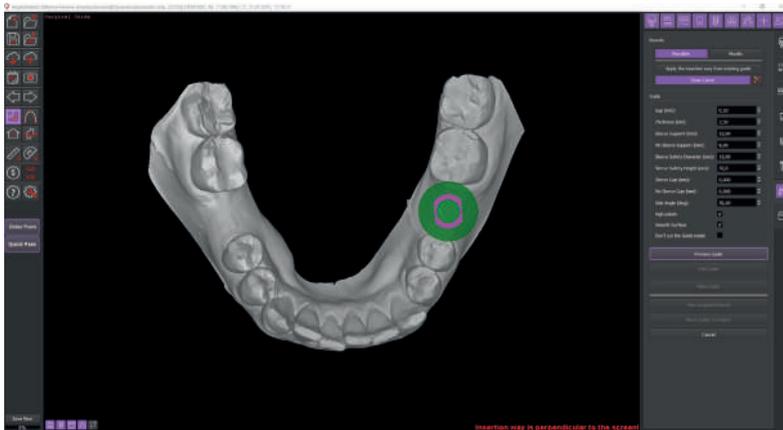

Solicitud de librerías: spain@dynamicabutment.com

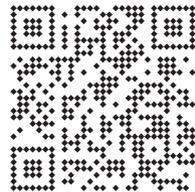

Esta versión impresa puede estar obsoleta y puede no incluir todos los productos o compatibilidades.

Escanea y descarga la última versión de este catálogo.

www.dynamicabutment.com



Virginia Woolf, 17
25005 · Lleida (Spain)

INTERNATIONAL +34 873 450 709
das@dynamicabutment.com

USA +34 873 450 707
usa@dynamicabutment.com

SPAIN +34 973 289 580
spain@dynamicabutment.com



www.dynamicabutment.com

